

ANVÄNDARINSTRUKTION



INFUSIONSSTÄLL

Gäller följande modeller:

080-3050, 080-3110, 080-3200, 080-3210

OBS!

Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen
noggrant INNAN produkten tas i bruk,
för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord

Garanti

Viktig information

1. Funktionsbeskrivning

1.1 Allmän beskrivning

2. Handhavande

2.1 Monteringsanvisning

2.2 Infusionsställ för pump

3. Underhåll och rengöring

3.1 Rutinkontroller

3.2 Rengöring

4. Teknisk specifikation

4.1 Måttuppgifter

4.2 Etiketter på produkten

5. Försäkran om överensstämmelse

6. Kontaktuppgifter

FÖRORD

Välkommen som ägare av ett Infusionsställ tillverkat av Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB. Vi hoppas att Ni skall bli nöjd och tillfredsställd med vår kvalitetsprodukt.

Om ett problem skulle uppstå med någon av våra produkter är Ni alltid välkomna att kontakta oss, så kommer vår serviceavdelning att assistera Er med den expertis som behövs för att lösa problemet.

Användarinstruktionen som Ni håller i Er hand innehåller all information som behövs för att använda, underhålla och utföra service på produkten. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i takt med att produkterna modifieras. Vi reserverar oss därför mot eventuella ändringar i användarinstruktionen.

GARANTI

Sjöbloms utfärdar 2 års garanti för material-, konstruktions- och fabrikationsfel, förutsatt att produkterna inte utsatts för yttre åverkan eller onormalt slitage. För att garantin ska gälla måste produkten ha använts i enlighet med användarinstruktionen, samt att service utförts enligt specifikationen.

VIKTIG INFORMATION

Denna produkt är avsedd för professionellt medicinskt bruk. Användarinstruktionen måste läsas igenom noggrant innan produkten tas i bruk, för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

Användarinstruktionen innehåller varningar där risk föreligger för personskada, som måste uppmärksammas. Felaktigt handhavande kan medföra livsfara.

En varningstriangel visas där särskilt viktig information återfinns.



Varningstriangel

1. FUNKTIONSBESKRIVNING

Detta infusionsställ är avsett för professionellt bruk inom vården.

Det är designat för att vara ett funktionellt och användarvänligt arbetsredskap för operatören och patienten.

Notera att produkten endast får användas av kompetent vårdpersonal som läst igenom användarinstruktionen, för ett rätt handhavande.

Allmän beskrivning

Infusionsställ, av helsvetsade förkromade stålrör. Fembensfot, med 100 mm trådskyddade länkhjul.


Infusionsstället är utrustat med fyra krokar och fembensfot, finns både med och utan körhandtag. Körhandtaget är löstagbart. Rattlåsningens expanderkonstruktion ger en mjuk och effektiv låsning vid höjning och sänkning av rör med fyrkrok.

2. HANDHAVANDE

2.1 Monteringsanvisning

Om infusionsstället levereras med fyrkroken omonterad, skruva ur skruven som sitter längst upp på innerröret. Ta bort tejen som håller fast fyrkroken under fembensfoten. Skruva fast kroken på innerröret. Drag åt ordentligt med sexkantsnyckel.


Skruva ur låsratten.

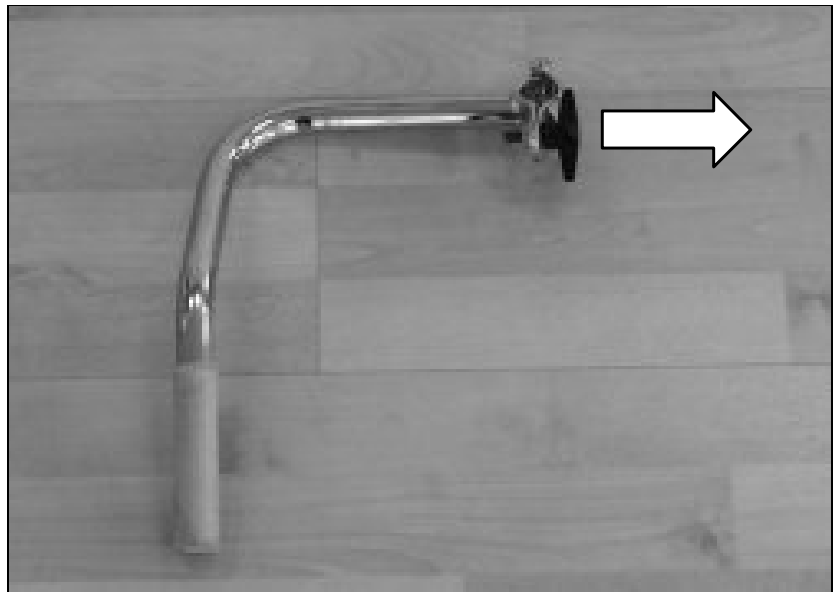

Vik ut gångjärnet.



Koppla fast handtaget runt
infusionsstället

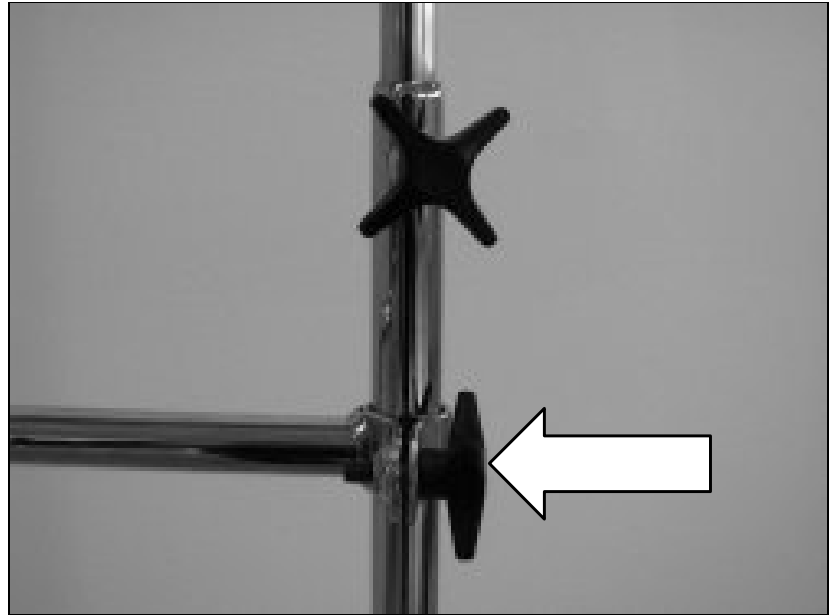

Skruva in låsratten ordentligt.



Om infusionsstället levereras med ytterröret omonterat, stick i röret i foten (bild 1-2) och dra åt insexskruven ordentligt (bild 3).

**OBS!****Skruva åt ordentligt.**

2.2 Infusionsställ för pump



OBS!

Maximal belastning för modell för doseringspump: 3 pumpar.

Placera pumparna så att de hamnar ovanför centrum av infusionsställets fembensfot.



3. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

3.1 Rutinkontroller

Rutinkontroller bör göras för att säkerställa fullgod funktion.



Viktigt!

Underlåtelse av följande rutinkontroll kan medföra att patienten och/eller operatören utsätts för onödiga risker samt att britsen kan få minskad livslängd. Kontrollera därför alla funktioner och delar på regelbunden basis.

Kontrollera följande:

- Eventuella missljud från hjul.
- Kontrollera att hjulen snurrar fritt och problemfritt.
- Lås rattens kondition så att röret sitter ordentligt
- Bultarnas fastsättning så att inga glapp kan förekomma.

3.2 Rengöring

Produkten kan rengöras och desinficeras utan särskilda restriktioner.

4. TEKNISK SPECIFIKATION


4.1 Måttuppgifter

Minimihöjd: 130 cm

Maxhöjd: 220 cm

Vikt: 5-7 kg


4.2 Etiketter på produkten

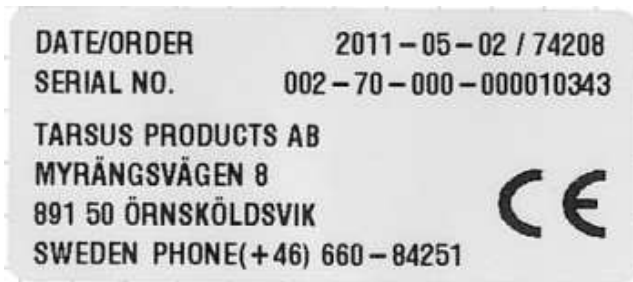


CE-etiketten innehåller datum, ordernummer, serienummer och våra kontaktuppgifter.



Maxvikten för britsarna är 200 kg.

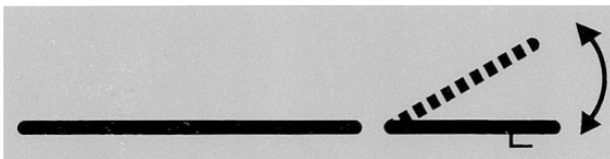

Visar reglering av ryggstödet. Det sitter en etikett på varje sida av britsen.

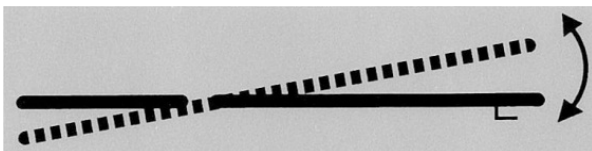

Visar reglering av chockläget. Det sitter en etikett på varje sida av britsen.

5. EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

enligt MDD 2007/42/EG inklusive tillägg
och enligt CE-märkningsdirektivet 93/68/EEC

Typ av utrustning: Undersökningsbrits, hydraulisk eller elektrisk
Fabrikat: Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB
Varumärke: Sjöbloms

Modell:	080-3050	Produktregistreringsnummer: 40509
Modell:	080-3110	Produktregistreringsnummer: 40509
Modell:	080-3200	Produktregistreringsnummer: 40509
Modell:	080-3210	Produktregistreringsnummer: 40509

I annex återfinns dokument som tillämpats för verifiering av överensstämmelse.

Tillverkare

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB
Myrångsvägen 8
S-891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Ytterligare information Direktivet för Medicintekniska Produkter

Produkten överensstämmer med de harmoniserade standarder, andra standarder och tekniska specifikationer angivna i annex.

Sjöbloms arbetar i enlighet med SS-EN ISO 9001:2000 och är andrapartscertifierade mot denna standard, vilket säkerställer överensstämmelse mellan tillverkad produkt och den tekniska dokumentationen.

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten följer bestämmelserna i de Direktiv som anges ovan.

Örnsköldsvik 2011-06-22



Karl-Gunnar Sjöblom
Produktionschef

Annex till**FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

Standarder	Datum	Notering
SS-EN 60601-1 C1	2010-05-06	
SS-EN 60601-1-2 C1	2010-05-06	

Följande företagsstandarder eller andra tekniska specifikationer har tillämpats:

Standarder	Datum	Notering
LVFS 2009:18	2009-10-08	Tillämpliga krav i lagen om medicintekniska produkter

6. KONTAKTUPPGIFTER

Sjöbloms sjukvårdsutrustning AB
Myrängsvägen 8
891 50 Örnsköldsvik
Sweden

Tel: 0660 105 80

Fax: 0660 180 00

E-mail: info@sjobloms.com

Hemsida: www.sjobloms.com