

MANUAL



**Bårtransportunderrede
030-2030**

**OBSERVERA! OPERATÖREN SKALL LÄSA IGENOM MANUALEN OCH DESS
HANDHAVANDEFÖRESKRIFTER NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK
FÖR ATT UNDVIKA ONÖDIGA RISKER FÖR PATIENT OCH OPERATÖR**

Postadress
Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB
Myrångsvägen 8
891 50 Örnsköldsvik, SWEDEN

Telefon
+46 (0)660 105 80

Telefax
+46 (0)660 180 00

Webb
www.sjobloms.com

E-post
info@sjobloms.com

Innehållsförteckning

Förord

Garanti

Viktig information

Tillbehörsspecifikation/Reservdelslista

Funktionsbeskrivning

Höjning & sänkning av underrede

Låsning av hjulen

Underhåll och rengöring

Smörjschema

Beskrivning, teknisk dokumentation

Byte av komponenter

Byte av hydraulpump

Förord

Välkommen som ägare till ett *Bårtransportunderrede* tillverkad av **Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB**. Vi hoppas att Ni skall bli nöjd och tillfredställd med vår kvalitetsprodukt. Vårt främsta mål är nämligen att våra kunder skall vara nöjda med våra produkter. Om ett problem skulle uppstå med någon av våra produkter är Ni alltid välkomna att kontakta vår serviceavdelning som kommer att assistera Er med den expertis som behövs för att lösa problemet.

Manualen Ni håller i Er hand innehåller all information som behövs för att använda, underhålla, utföra service samt instruktioner för att byta ut reservdelar på produkten. Manualen uppdateras kontinuerligt i takt med att produkterna modifieras. Vi reserverar oss därför mot eventuella ändringar i manualen.

Garanti

2 års garanti utfärdas för material-, konstruktions- och fabrikationsfel förutsatt att produkterna ej utsatts för yttre åverkan eller onormalt slitage. Detta förutsatt att produkten används enligt manualen samt att erforderlig service utförts enligt specifikationen.

Viktig information

Manualen måste läsas igenom noggrant innan produkten tas i bruk för att undvika onödiga risker på patient och operatör.


Manualen innehåller varningar där risk föreligger för personskada och måste uppmärksammas.

En varningstriangel visas där väldigt viktig information återfinns.



Varningstriangel


Tillbehörsspecifikation/Reservdelstlista

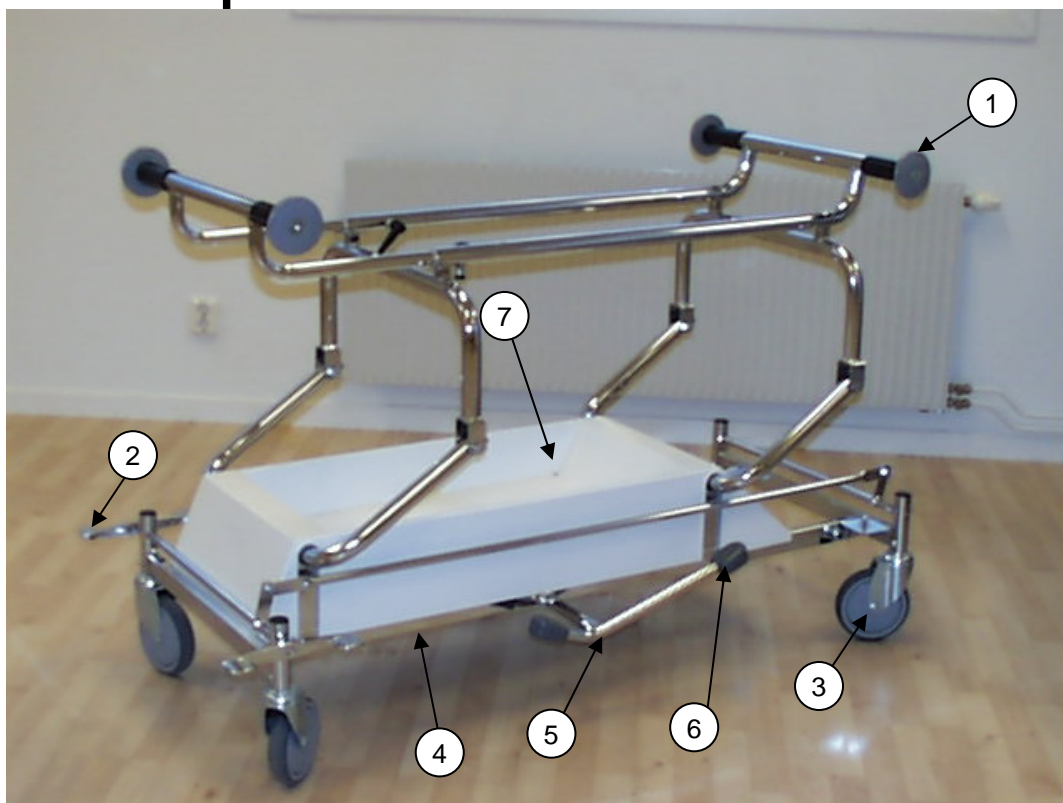

Pos	Art nr	Benämning
1	030-2035	Avvisarhjul
2	010-8056	Centrallåsningpedal
3	030-1008	Hjul, 150 mm centrallåsta
4	010-8500	Hydraulpump
5	010-8501	Pedal för höj-/sänkning av britsen
6	010-8550	Pedalgummi
7	010-8516	Skyddskåpa

Funktionsbeskrivning

Höjning och sänkning av underrede

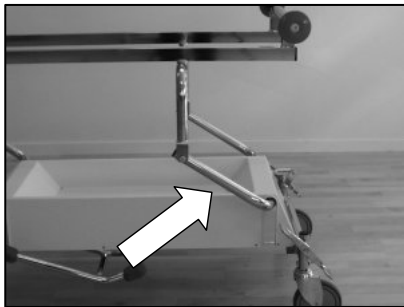


Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom britsens arbetsområde, då klämrisk föreligger mellan lyftarmar och plastkåpa. Se bild till vänster.


Klämrisk

Höjning av underrede

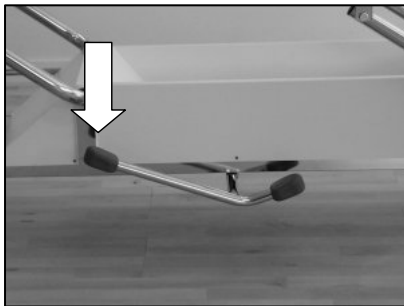


Tryck/pumpa med foten på den långa delen av fotpedalen (se pil). Återupprepa tryck-/pumpningen till dess att önskad höjd är uppnådd.

Sänkning av underrede

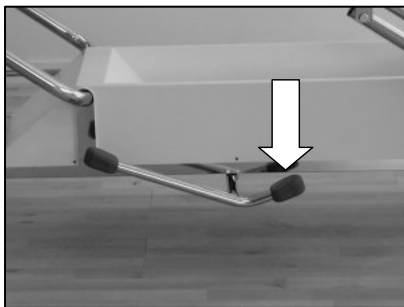

Tryck ned foten på den korta delen av fotpedalen (se pil). Håll kvar där och underredet sjunker. Ta bort foten när önskad höjd är uppnådd.

Låsning av hjulen

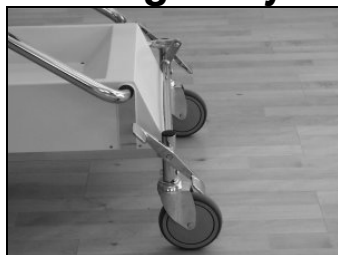

Låsta hjul




Fria hjul



Riktningsspärrade hjul

Funktionsbeskrivning

Förlängning av överdel

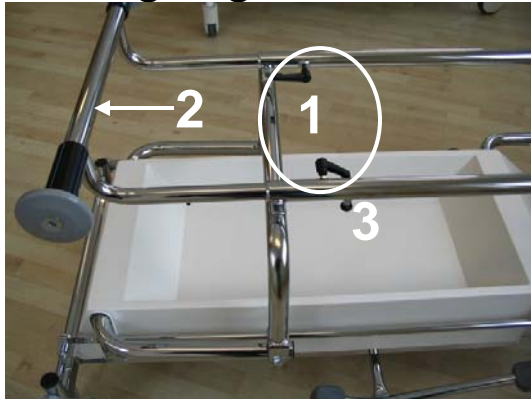

Överdelen är reglerbar i sidled mellan 102 och 127 cm.
Frigör innerröret genom att lätta på vreden (1). Om innerröret skulle ha fastnat, vilket kan ske när metall vilar mot metall, kan du slå lätt med handen (se pil 2). När innerröret nått sin maximala längd låses röret med en sprint (3).


Förkortning av överdel



Dra sprinten nedåt och tryck samtidigt in överdelen.
Lås vreden (1) när du uppnått önskad längd.

Låsning av hjulen


Låsta hjul

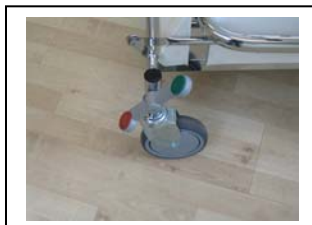

Fria hjul



Riktningsspärrade hjul

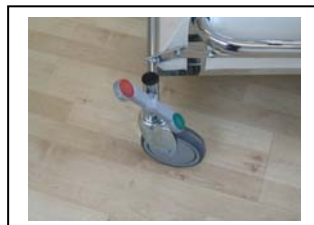

Underhåll och rengöring

Underredet rengöres med varmt vatten eller tvållösning. Vid desinficering används **DAX Ytdesinfektion Plus™¹** innehållande Isopropanol PEG40, Hydrogenated Castor Oil Water, eller likvärdig.

Underredet är i princip underhållsfri, men rutinkontroller skall göras för att säkerställa fullgod funktion.




Underlåtelse av följande rutinkontroll kan medföra att patienten utsätts för onödiga risker samt att underredet kan få minskad livslängd. Kontrollera därför alla funktioner och delar på regelbunden basis.

Kontrollera följande:


- Eventuella missljud
- Hjul med låsmekanism
- Hydraulpumpens funktion

Smörjschema

Smörjning enligt schema nedan skall utföras var sjätte månad.

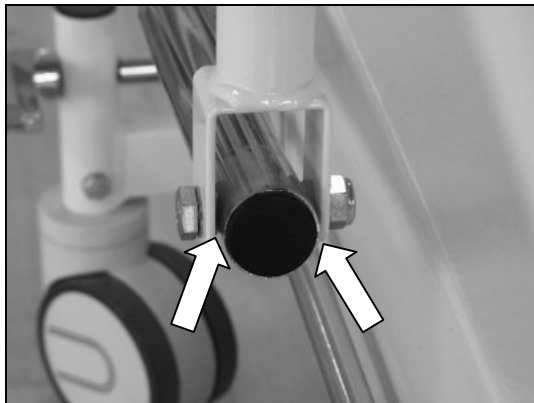

Smörj lyftarmslederna några dropp olja för att förhindra missljud. Torka bort överflödiga olja.

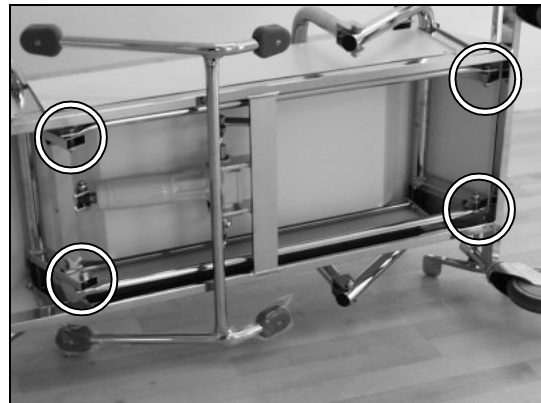

Smörj lyftbågarna med vanlig smörjolja. Torka bort överflödiga olja.

¹ DAX Ytdesinfektion Plus™ är testad och godkänd enligt de Europeiska normerna för desinfektionsmedel.

Beskrivning, teknisk dokumentation

Utförande

Bårtransportunderredet är hydrauliskt höj- och sänkbart.

Stativ

Helsvetsat förkromat. Hydrauliskt höj- och sänkbart, hydraulpump och länkarmar under täckkåpa.

Överdel

Helsvetsad konstruktion med stötdämpande avvisarhjul i hörnen.

Hydraul

Römheld nr 8921-500-406.

Hjul

4 centrallåsta hjul varav ett riktningsspärrat.

150 mm trådskyddade länkhjul med dubbla kullager i såväl nav som svängkrans.

Mått

Högsta höjd: 94 cm.

Minsta höjd: 58 cm.

Längd: 150 cm.

Bredd: 65 cm.

Vikt

Bårtransportunderredets egenvikt är 40 kg.

Lyftkapacitet

Maximal lyftkapacitet är 200 kg.


Byte av komponenter

Byte av hydraulpump



Varning!

Observera att britsen ramlar i bottenläge när hydraulpumpen tas bort med klämrisk som följd. Därför måste underredet ligga på sidan innan bytet sker.

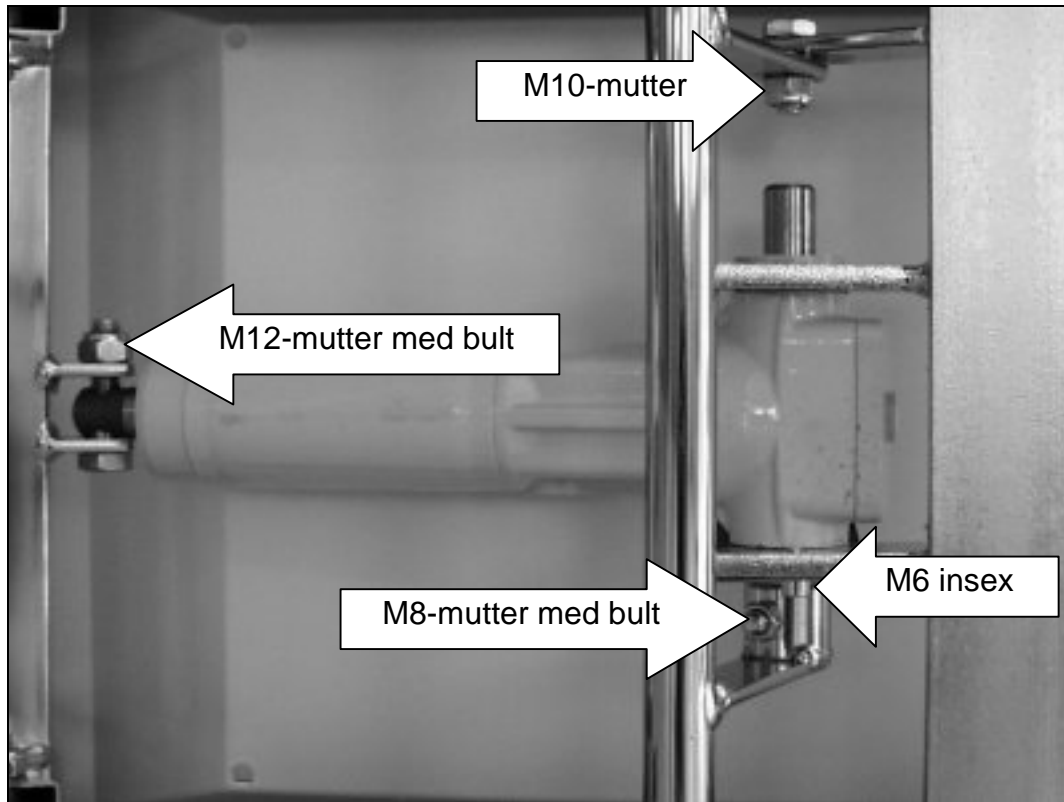

1. Ta någon till hjälp och vänd britsen på sidan.
2. Skruva bort pedalen genom att ta bort M10-mutter och bult samt M8-mutter och bult på pedalupphängningen.
3. Lossa M12-mutter på hydraulpump och ta ur M12 bult.
4. Ta bort låsbrickan genom att öppna M6 insexskruv.
5. Byt hydraulpump och montera i omvänd ordning. Observera att om man drar M10-bulten för hårt går pedalen trögt.