

ANVÄNDARINSTRUKTION



TVÅDELAD PATIENT- OCH AKUTVAGN

Gäller följande modeller:

REF

B1-230-1100-1005, B1-230-1100-1010



Om du har QR-läsare kan du öppna Användarinstruktionen digitalt här och spara den på den enhet du själv föredrar.

OBS!

Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen noggrant INNAN produkten tas i bruk, för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord

Garanti

Viktig information

1. Funktionsbeskrivning

1.1 Allmän beskrivning

2. Handhavande

2.1 Höjning/sänkning av patientvagnen

2.2 Höjning/sänkning av ryggstödet

2.3 Höjning/sänkning av chockläget

2.4 Hjulens funktion

2.5 Sidogrindar

2.6 Infusionsstativ

2.7 Styrhandtag och korg

3. Underhåll och rengöring

3.1 Rutinkontroller

3.2 Rengöring

3.3 Smörjschema

3.4 Reservdelslista

3.5 Tillbehör

3.6 Smörj-, rengörings- och desinfektionsmedel

4. Teknisk specifikation

4.1 Måttuppgifter

4.2 Etiketter på produkten

5. Försäkran om överensstämmelse

6. Kontaktuppgifter

FÖRORD

Välkommen som ägare av en Patientvagn tillverkad av Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB. Vi hoppas att Ni skall bli nöjd och tillfredsställd med vår kvalitetsprodukt.

Om ett problem skulle uppstå med någon av våra produkter är Ni alltid välkomna att kontakta oss, så kommer vår serviceavdelning att assistera Er med den expertis som behövs för att lösa problemet.

Användarinstruktionen som Ni håller i Er hand innehåller all information som behövs för att använda, underhålla och utföra service på produkten. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i takt med att produkterna modifieras. Vi reserverar oss därför mot eventuella ändringar i användarinstruktionen.

GARANTI


Sjöbloms utfärdar 2 års garanti för material-, konstruktions- och fabrikationsfel, förutsatt att produkterna inte utsatts för yttre åverkan eller onormalt slitage. För att garantin ska gälla måste produkten ha använts i enlighet med användarinstruktionen, samt att service utförts enligt specifikationen.

VIKTIG INFORMATION

Denna produkt är avsedd för professionellt medicinskt bruk. Användarinstruktionen måste läsas igenom noggrant innan produkten tas i bruk, för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

Användarinstruktionen innehåller varningar där risk föreligger för personskada, som måste uppmärksammas. Felaktigt handhavande kan medföra livsfara.

En varningstriangel visas där särskilt viktig information återfinns.

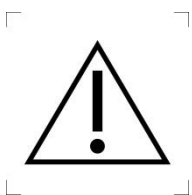

Varningstriangel

1. FUNKTIONSBESKRIVNING

Denna patient- och akutvagn är avsedd för professionellt bruk inom vården, för undersökning av patient.

Den är designad för att vara ett funktionellt och användarvänligt arbetsredskap för operatören och patienten.

Notera att produkten endast får användas av kompetent vårdpersonal som läst igenom användarinstruktionen, för ett rätt handhavande.

Allmän beskrivning

Patient- och akutvagn med hydraulisk höjdjustering. Förkromat chassi av helsvetsade stålrör. Ryggstöd och chockläge regleras av gaskolv.

Löstagbar dyna utan handtag, med friktionsbehandlad undersida. Finns i 5 cm, där innermaterialet är kallskum, eller 10cm tjocklek där materialet är en mix som gör den mycket liggvänlig, med 5 cm tryckavlastande flexskum + 5 cm kallskum.

Lättrullande centrallåsta 150 mm hjul med ett riktningsspärrat hjul.


Diverse tillbehör såsom infusionsställ och sidogrindar finns att tillgå.

2. HANDHAVANDE

2.1 Höjning/sänkning


Höjning av patientvagn

Pumpa med foten på den långa delen av fotpedalen tills önskad höjd uppnåtts.

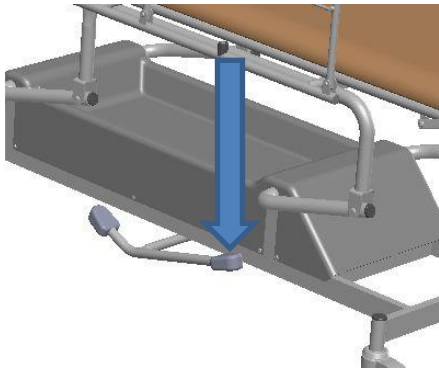

Sänkning av patientvagn

Tryck ned foten på den korta delen av fotpedalen. Håll kvar där och britsen sjunker.

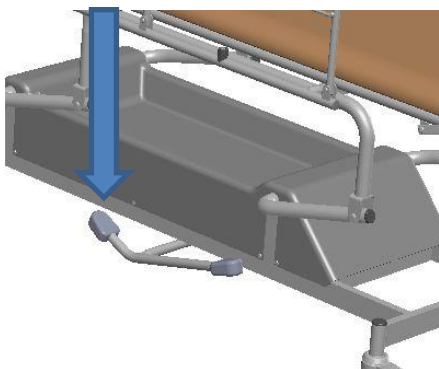


Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.

2.2 Höjning/sänkning av ryggstöd

Höjning av ryggstöd


Fatta tag i minst ett av handtagen som finns placerade på sidan av ryggstödet.

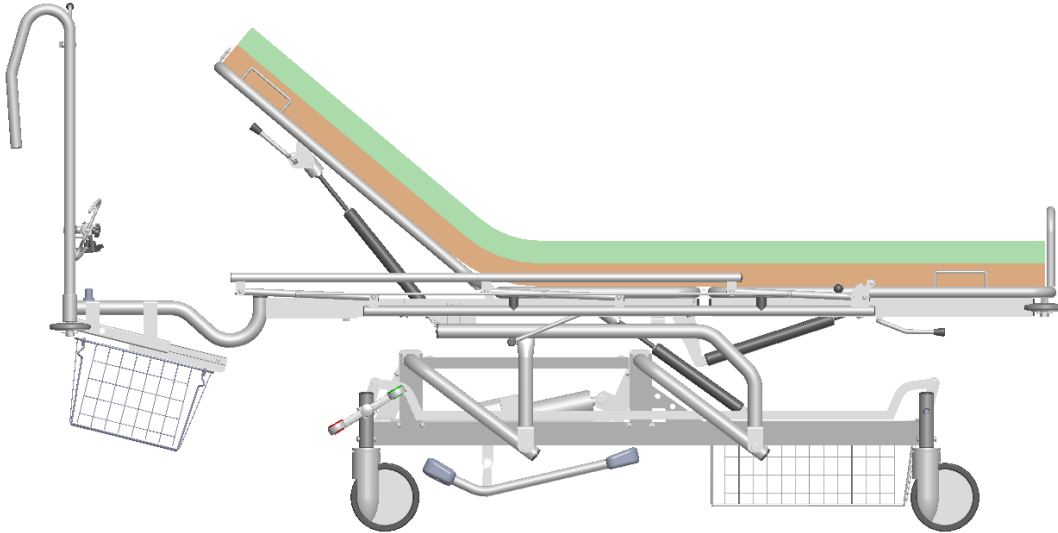

Tryck handtaget uppåt och gaskolven hjälper till att höja ryggstödet (steglös reglering).

Sänkning av ryggstöd

Tryck in handtaget igen och pressa ryggstödet nedåt.

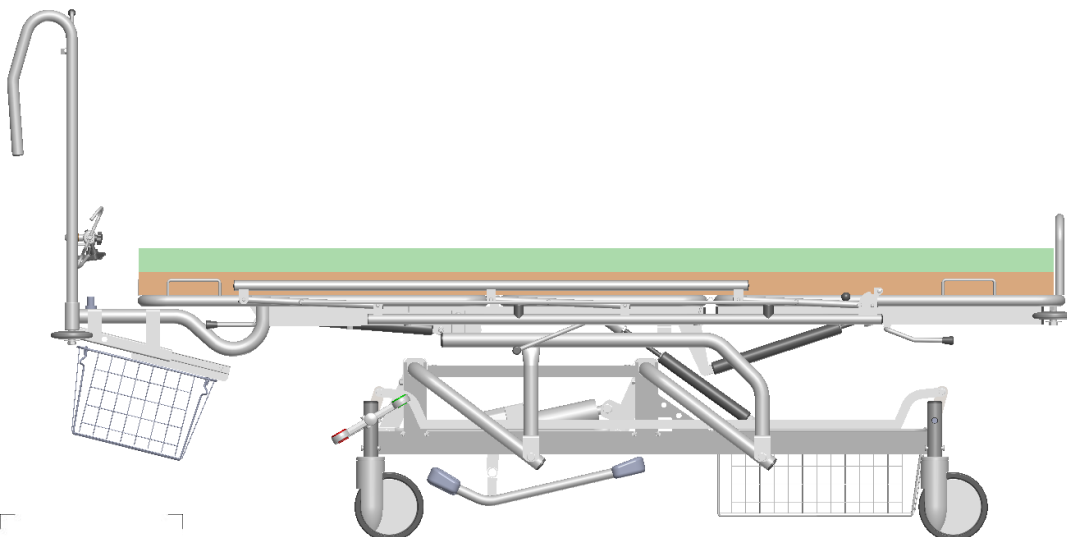


Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.

2.3 Höjning/sänkning av chockläge

Höjning av chockläge


Stå vid liggplanets fotsida. Fatta tag handtagen som finns placerade vid sidan av liggplanet.

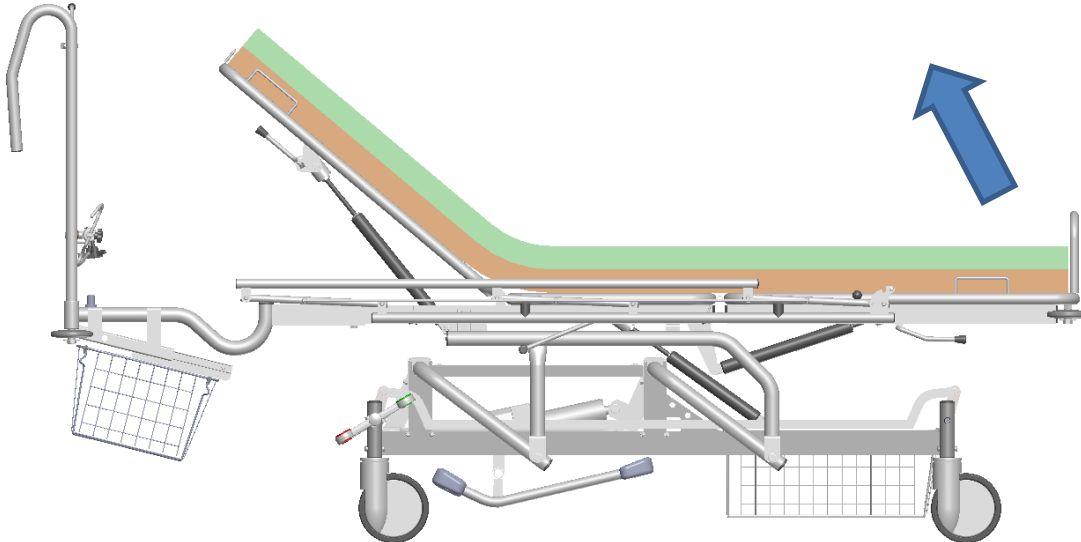

Tryck handtaget uppåt och gaskolven hjälper till att ställa britsen i chockläge (steglös reglering).

Sänkning av chockläge

Tryck åter på handtagen och pressa liggplanet nedåt.

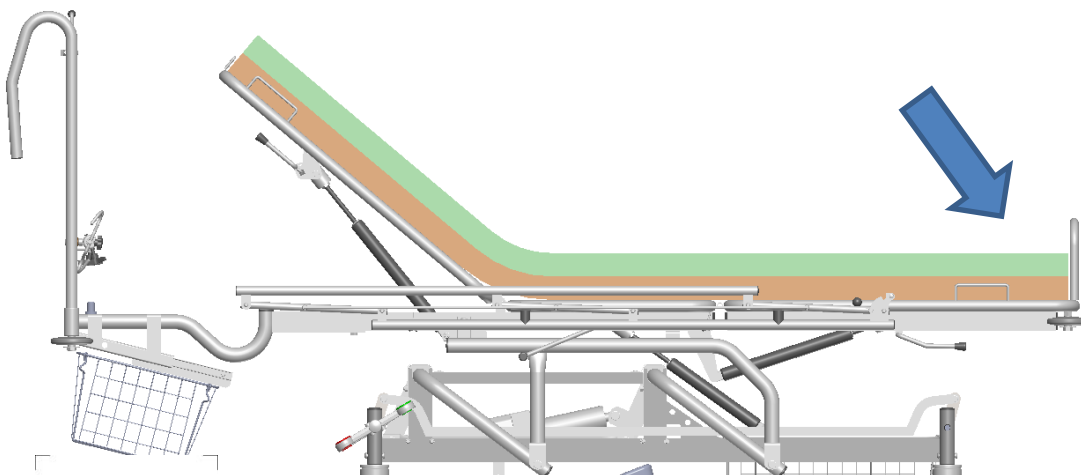


Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.


2.4 Hjulens funktion

Patientvagnen är utrustad med centrallåsta hjul inklusive så kallad riktningspär, en funktion som gör att man enkelt kan styra produkten rakt i exempelvis långa korridorer.


Fria hjul

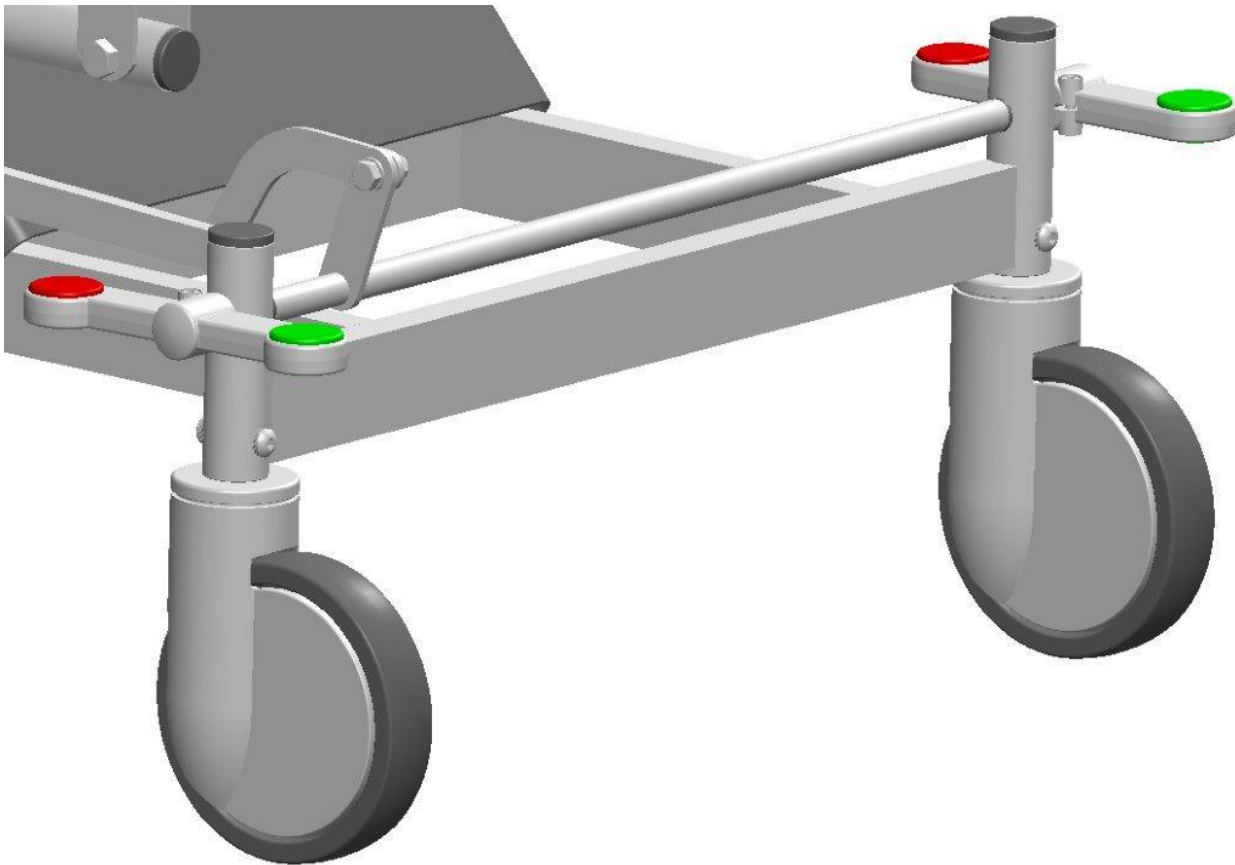



Riktningspärade hjul

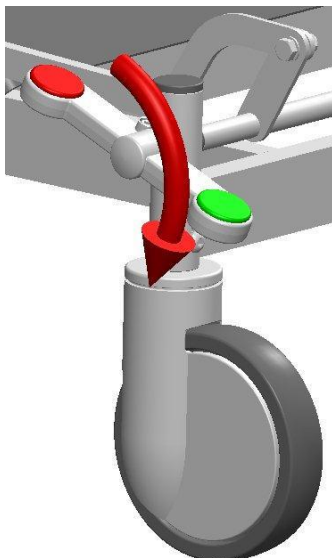

Bromsade hjul

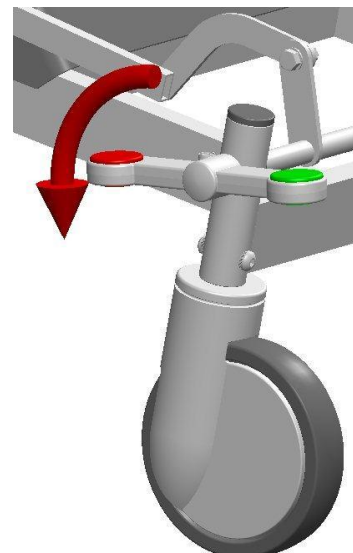

2.5 Sidogrindar

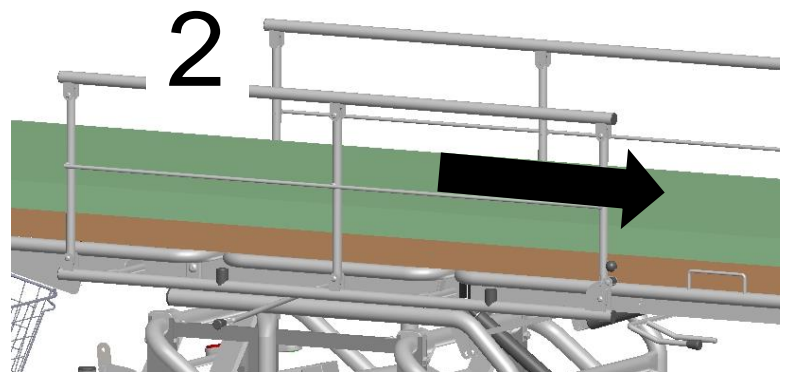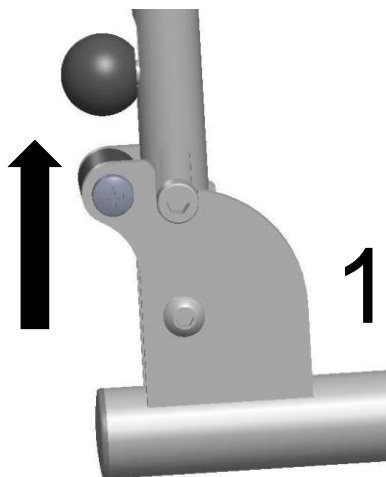

1. Lyft kulan.
 2. Fäll sidogrinden med andra handen i pilens riktning.
- Klart!


När man ska fälla upp grinden igen drar man bara upp den i motsatt riktning, tills mekaniken/kulan kommer i sitt ursprungsläge.



Varning!

Klämrisk föreligger. Var uppmärksam när du fäller ner sidogrindarna.

2.6 Infusionsstativ

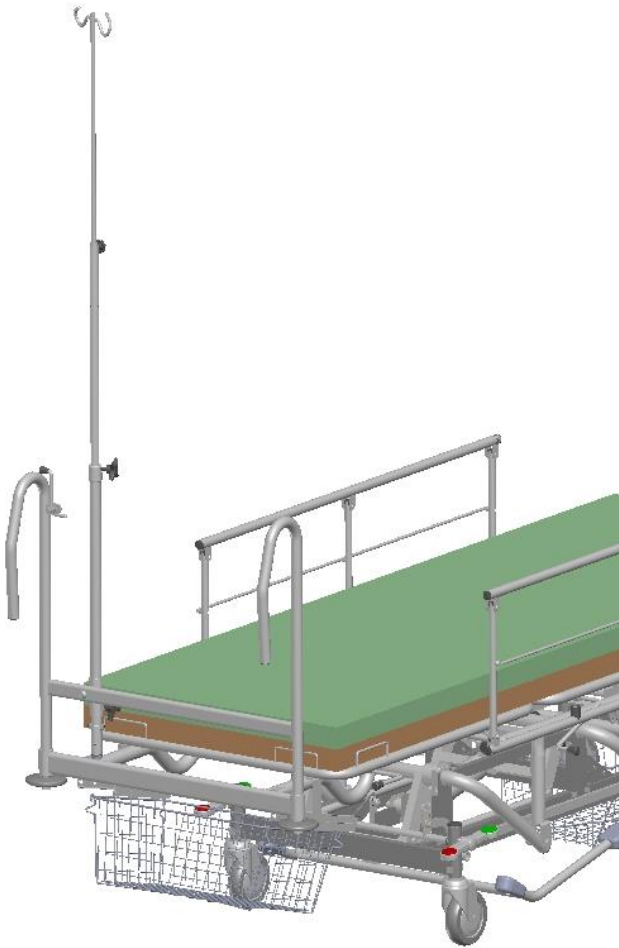

Infusionsstativet kan regleras upp och ner. Lås/öppna vredet när du ska reglera höjden på infusionsstativet.




När infusionsstället fällts ihop kan det placeras och förvaras enligt bild till vänster.



OBS!

Man får inte styra patientvagnen framåt/bakåt genom att hålla i infusionsstativet, då böjs det och går inte att höja/sänka.

2.7 Styrhandtaget och korgen

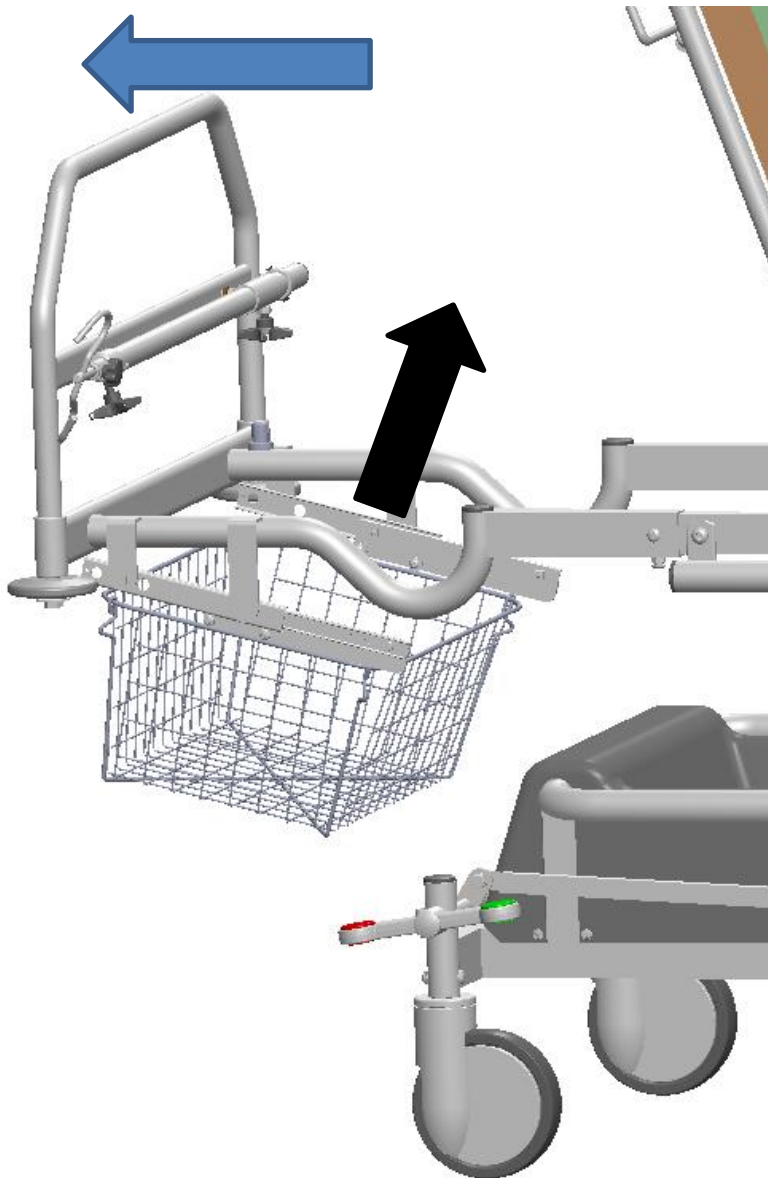

Handtaget kan dras bakåt och korgen tas bort vid behov.

3. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

3.1 Rutinkontroller

Rutinkontroller och smörjning enligt schema nedan bör göras var 6:e månad eller vid behov för att säkerställa fullgod funktion.



Underlåtelse av följande rutinkontroll kan medföra att patienten och/eller operatören utsätts för onödiga risker samt att produkten kan få minskad livslängd. Kontrollera därför alla funktioner och delar på regelbunden basis. Kontrollera följande:

- Eventuella missljud.
- Gaskolvens funktion.
- Hydraulpumpens funktion
- Hjulens och hjullåsmekanismens funktion.
- Att leder och infästningar smörjs enligt smörjschema.

3.2 Rengöring

Rengöring av dyna

Vid blod, avföring på väven bör den rengöras snarast möjligt med kallt vatten och såpa, tvållösning. Därefter desinficeras den med alkohol med tensider – tensider ger en djuprengörande effekt på ytskiktet. Alkohol utan tensider avdunstar fort och hinner inte verka.


Klor

Klorbaserade rengöringsmedel rekommenderas generellt inte. Klor påverkar såväl produkter som miljö negativt, även om såväl spädningens koncentration som hur man efterbehandlar produkten inverkar. Om klorbaserat medel trots allt används rekommenderas att produkten eftertorkas med lätt vattenfuktad trasa. Överdrag i PU är inte kompatibelt med klor. PVC klarar det acceptabelt.

Rengöring och skötsel av dyna "Specialmadrass Brand"

Se separat manual.





3.3 Smörjschema

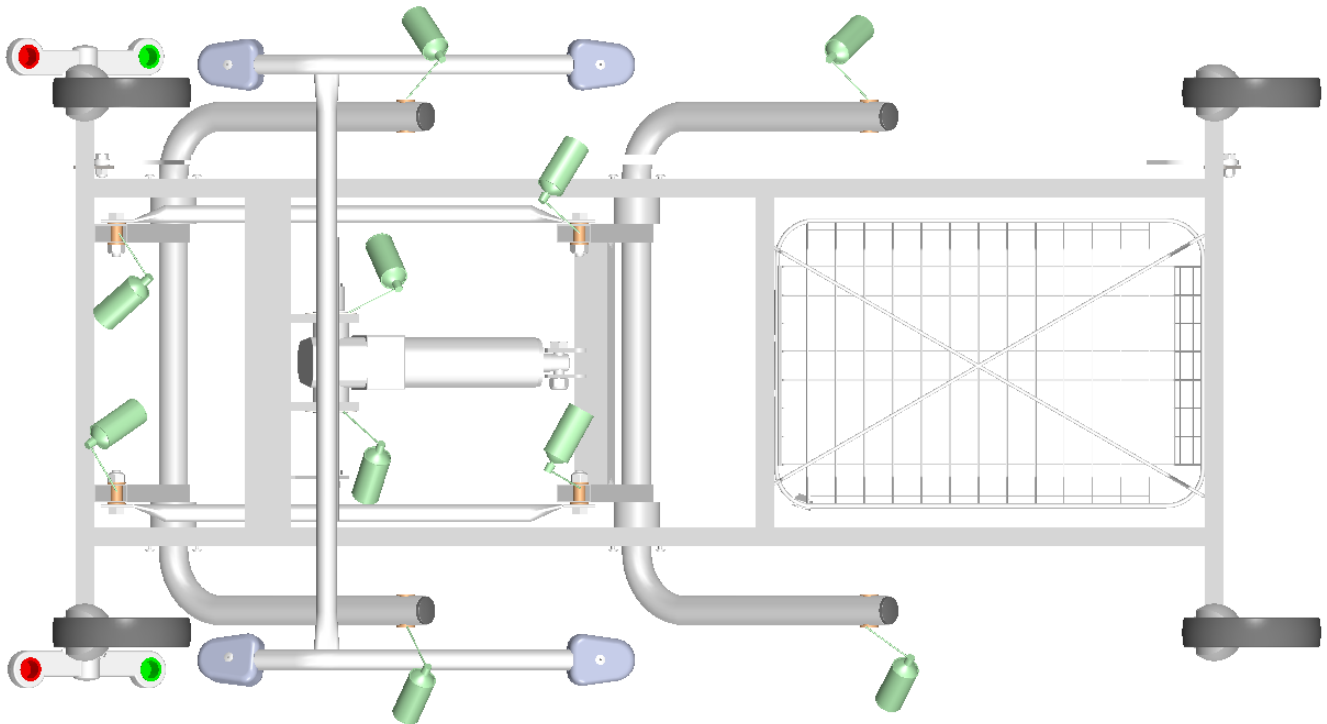

1. Lås först hjulen.
2. Ta någon till hjälp och tippa patientvagnen på sidan, för att kunna smörja de rörliga lederna.

Sprayburken på bilderna ovan indikerar var man ska smörja. Använd helst **”Smörjolja för Sjöbloms/Tarsus medicinska möbler”** eller likvärdig för bästa resultat, art nr 5557001.

3.4 Reservdelslista patientvagn

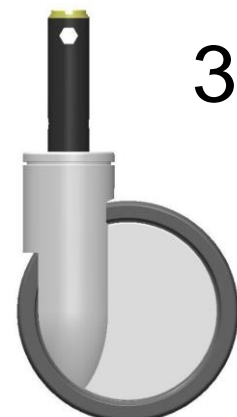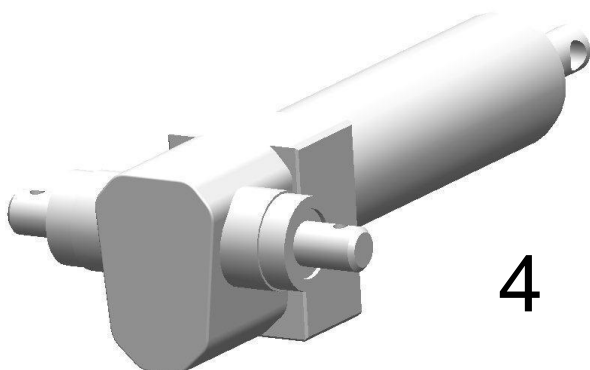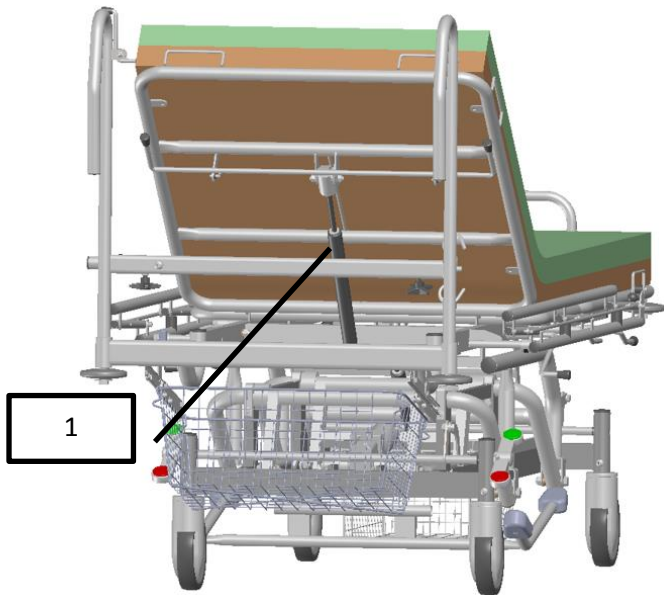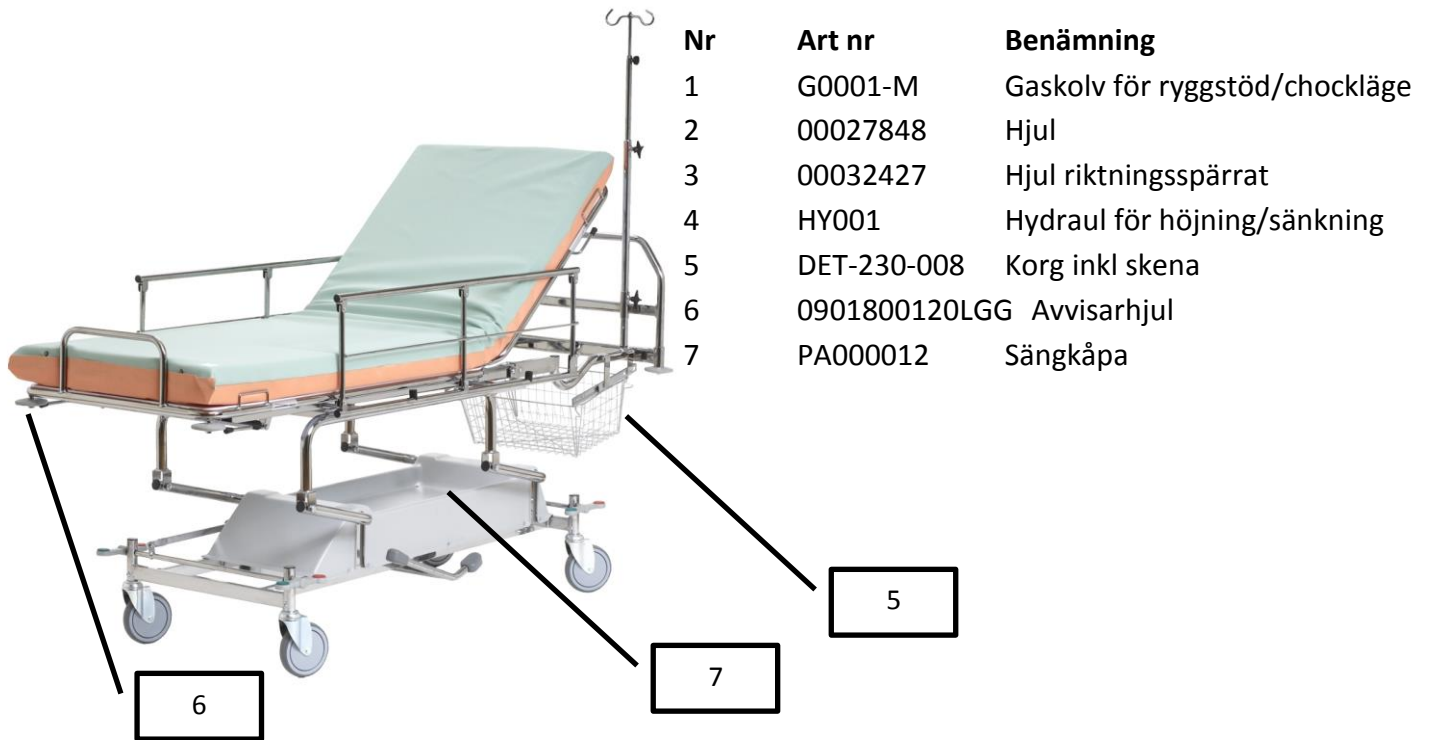

3.5 Tillbehör



Infusionsstativ, sidogrindar

3.6 Smörj-, rengörings- och desinfektionsmedel

R-1, Rengöringsmedel för konstläder

5557001, Olja för smörjning av medicinska möbler

C068, Desinfektionsmedel DAX Plus



Smörjolja



Rengöringsmedel



Desinfektionsmedel

4. TEKNISK SPECIFIKATION

4.1 Måttuppgifter

Längd: 200 cm (215 inkl avvisarhjulen)

Bredd liggyta: 70 cm

Bredd inkl avvisarhjulen: 73 cm

Bredd inkl sidogrindar: ca 78 cm

Höjd: 53-91 cm

Ryggstöd, längd: 75 cm

Ryggstöd, vinkel: +64°


Chockläge, vinkel: -14°

Vikt: ca 68 kg

Max patientvikt: 200 kg

SWL: 220 kg


4.5 Etiketter på produkten

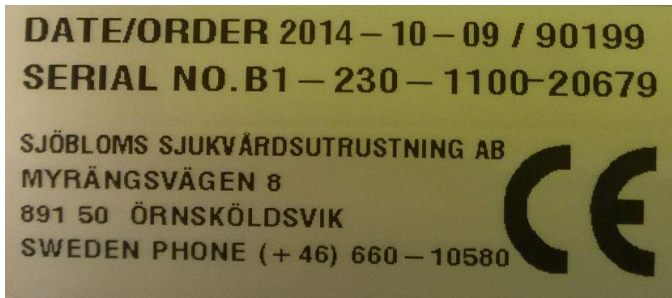


CE-etiketten innehåller datum, ordernummer, serienummer och våra kontaktuppgifter.



Max patientvikt 200 kg.

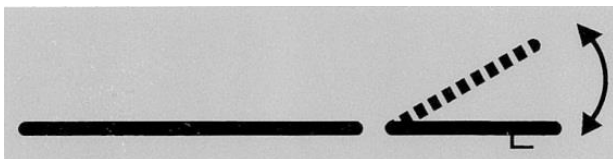

Visar reglering av ryggstödet.
Det sitter en etikett på varje sida av britsen.

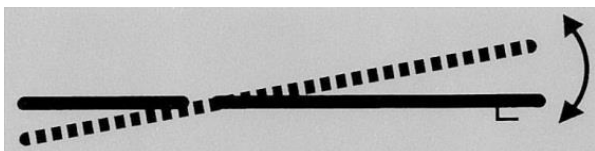

Visar reglering av chockläget.
Det sitter en etikett på varje sida av britsen.

5. EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Typ av utrustning: Patientvagn 2-delad

Art nr: B1-230-1100-1005

Produktreg.nr: 77187

Art nr: B1-230-1100-1010

Produktreg.nr: 77187

Tillverkare


Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB

Myrängsvägen 8

S-891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller tillämpliga krav i såväl EU-direktiv MDD 93/42/EEC och lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter.


Örnsköldsvik 2015-08-27



Karl-Gunnar Sjöblom

Produktionschef

6. KONTAKTUPPGIFTER

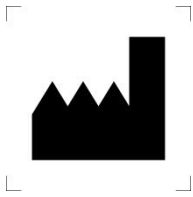

Sjöbloms sjukvårdsutrustning AB
Myrängsvägen 8
891 50 Örnsköldsvik
Sweden

Tel: 0660 105 80

Fax: 0660 180 00

E-mail: info@sjobloms.com

Hemsida: www.sjobloms.com