

ANVÄNDARINSTRUKTION



TREDELAD PATIENT- OCH AKUTVAGN

Gäller följande modell:

REF

B1-130-1100



Om du har QR-läsare kan du öppna
Användarinstruktionen digitalt här och
spara den på den enhet du själv föredrar.

OBS!

Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen
noggrant INNAN produkten tas i bruk,
för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord

Garanti

Viktig information

1. Funktionsbeskrivning

1.1 Allmän beskrivning

2. Handhavande

- 2.1 När patienten sätter sig
- 2.2 Höjning/sänkning av patientvagnen
- 2.3 Reglering av ryggstödet
- 2.4 Reglering av chockläget
- 2.5 Reglering av bendelen
- 2.6 Hjulens funktion
- 2.7 Sidogrindar
- 2.8 Infusionsstativ
- 2.9 Förvaringskorg

3. Underhåll och rengöring

- 3.1 Rutinkontroller
- 3.2 Rengöring
- 3.3 Smörjschema
- 3.4 Reservdelslista
- 3.5 Tillbehör
- 3.6 Smörj-, rengörings- och desinfektionsmedel

4. Teknisk specifikation

- 4.1 Måttuppgifter
- 4.2 Etiketter på produkten

5. Försäkran om överensstämmelse

6. Kontaktuppgifter

FÖRORD

Välkommen som ägare av en Patientvagn tillverkad av Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB. Vi hoppas att Ni skall bli nöjd och tillfredsställd med vår kvalitetsprodukt.

Om ett problem skulle uppstå med någon av våra produkter är Ni alltid välkomna att kontakta oss, så kommer vår serviceavdelning att assistera Er med den expertis som behövs för att lösa problemet.

Användarinstruktionen som Ni håller i Er hand innehåller all information som behövs för att använda, underhålla och utföra service på produkten. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i takt med att produkterna modifieras. Vi reserverar oss därför mot eventuella ändringar i användarinstruktionen.

GARANTI

Sjöbloms utfärdar 2 års garanti för material-, konstruktions- och fabrikationsfel, förutsatt att produkterna inte utsatts för yttre åverkan eller onormalt slitage. För att garantin ska gälla måste produkten ha använts i enlighet med användarinstruktionen, samt att service utförts enligt specifikationen.

VIKTIG INFORMATION

Denna produkt är avsedd för professionellt medicinskt bruk. Användarinstruktionen måste läsas igenom noggrant innan produkten tas i bruk, för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

Användarinstruktionen innehåller varningar där risk föreligger för personskada, som måste uppmärksammas. Felaktigt handhavande kan medföra livsfara.

En varningstriangel visas där särskilt viktig information återfinns.



Varningstriangel

1. FUNKTIONSBESKRIVNING

Denna patient- och akutvagn är avsedd för professionellt bruk inom vården, för undersökning av patient.

Den är designad för att vara ett funktionellt och användarvänligt arbetsredskap för operatören och patienten.

Notera att produkten endast får användas av kompetent vårdpersonal som läst igenom användarinstruktionen, för ett rätt handhavande.

Allmän beskrivning


Patient- och akutvagn med hydraulisk höjdjustering. Förkromat chassi av helsvetsade stålrör. Ryggstöd och chockläge regleras av gaskolv.

Löstagbar dyna utan handtag, med friktionsbehandlad undersida. Finns i olika utföranden.

Lättrullande centrallåsta 150 mm hjul med funktionen riktningsspärr alternativt ett femte styrhjul (tillval).

2. HANDHAVANDE

2.1 När patienten sätter sig

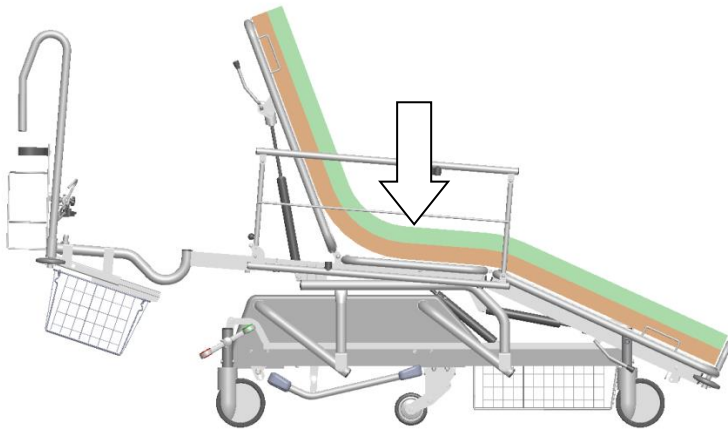


Fäll ner en av sidogrindarna, så att patienten kan sätta sig korrekt.

Patienten ska gå av och på vagnen från sidan.

**OBS!**

Det förekommer en risk för att klädesplagg kan fastna i hjulfästet (A).

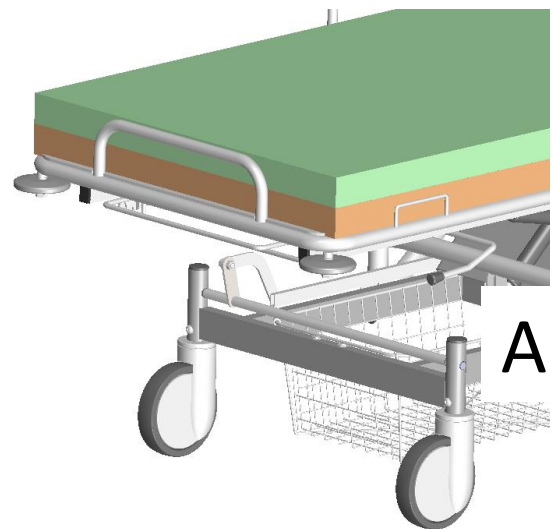**OBS!**

Patienten ska inte sätta sig vid fot- eller huvudändan (se pilar till vänster).
Tipprisk förekommer.


**Varning!**

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.

2.2 Höjning/sänkning


Höjning av patientvagn

Pumpa med foten på den långa delen av fotpedalen tills önskad höjd uppnåts.

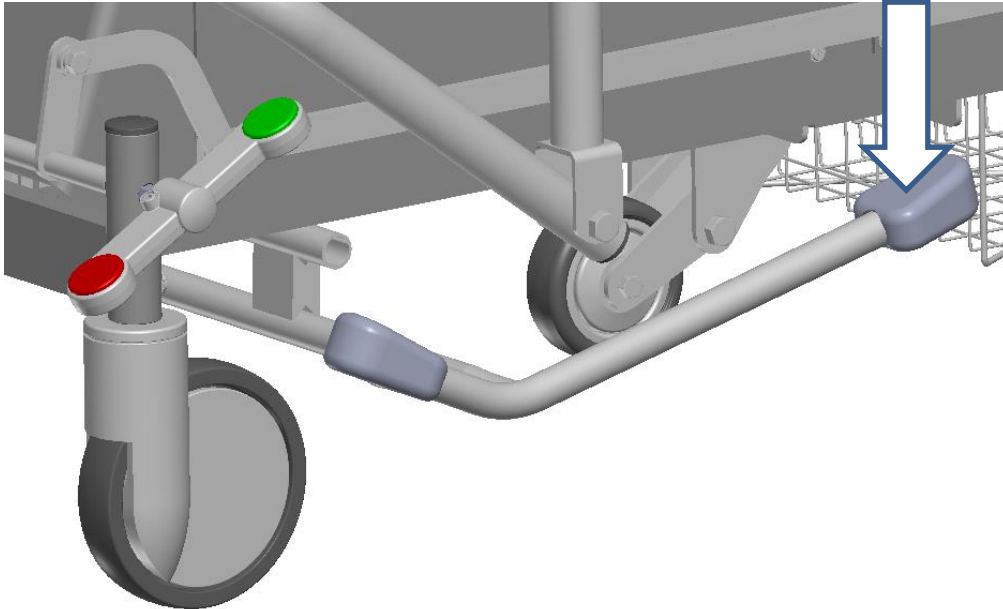

Sänkning av patientvagn

Tryck ned foten på den korta delen av fotpedalen. Håll kvar där och britsen sjunker.

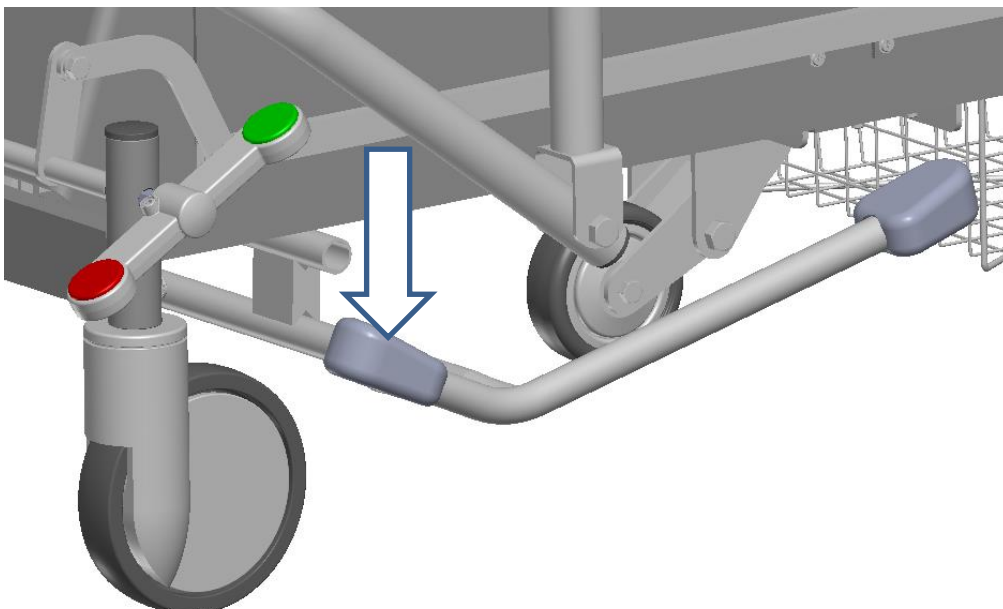


Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.

2.3 Reglering av ryggstöd

Höjning av ryggstöd

Fatta tag i minst ett av handtagen som finns placerade på sidan av ryggstödet.

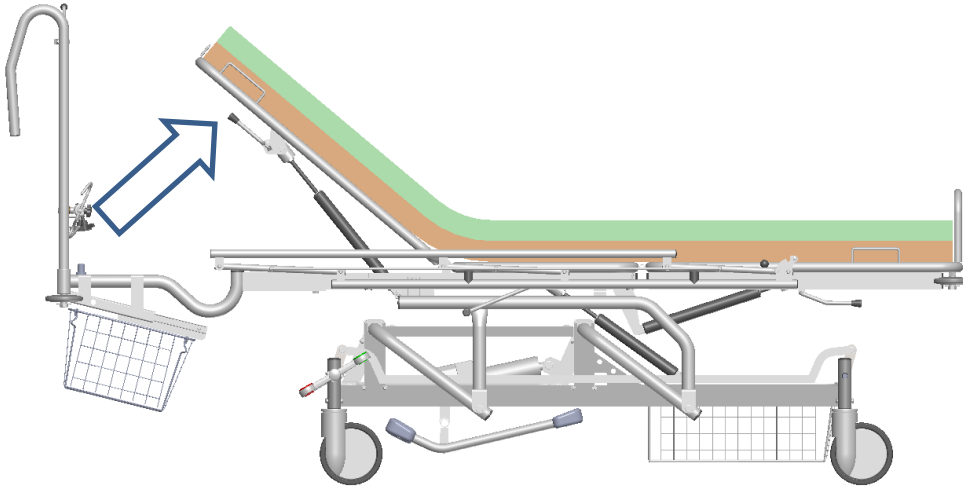

Tryck handtaget uppåt och gaskolven hjälper till att höja ryggstödet (steglös reglering).

Sänkning av ryggstöd

Tryck in handtaget igen och pressa ryggstödet nedåt.




Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.


2.4 Reglering av chockläge

Höjning av chockläge

Stå vid liggplanets fotsida. Fatta tag i bygeln som finns placerad under kortsidan vid fotänden (se nedre bild).

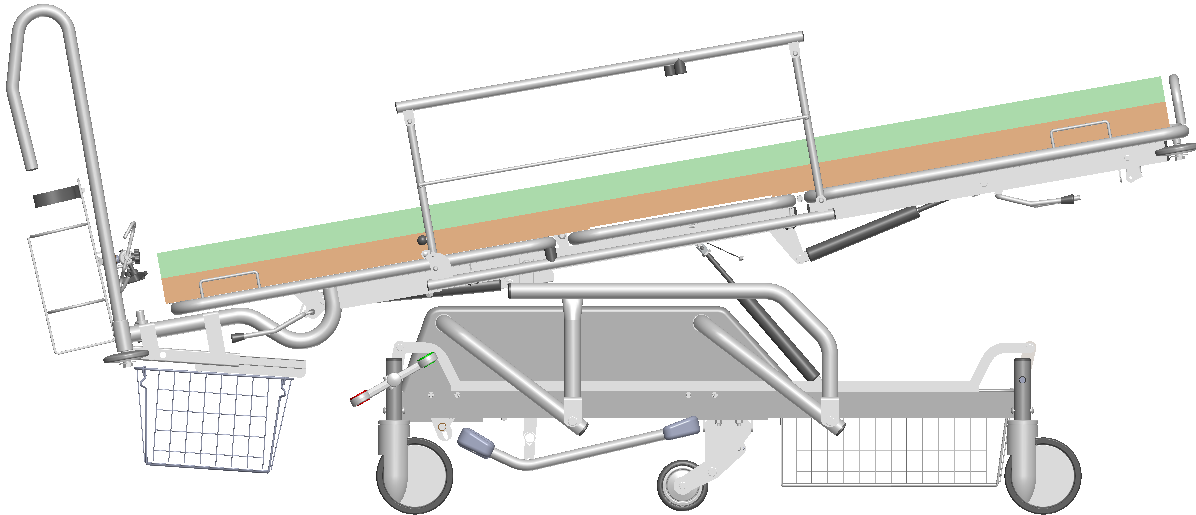

Tryck bygeln uppåt och gaskolven hjälper till att ställa britsen i chockläge (steglös reglering). Det är även möjligt att ställa in negativt chockläge.

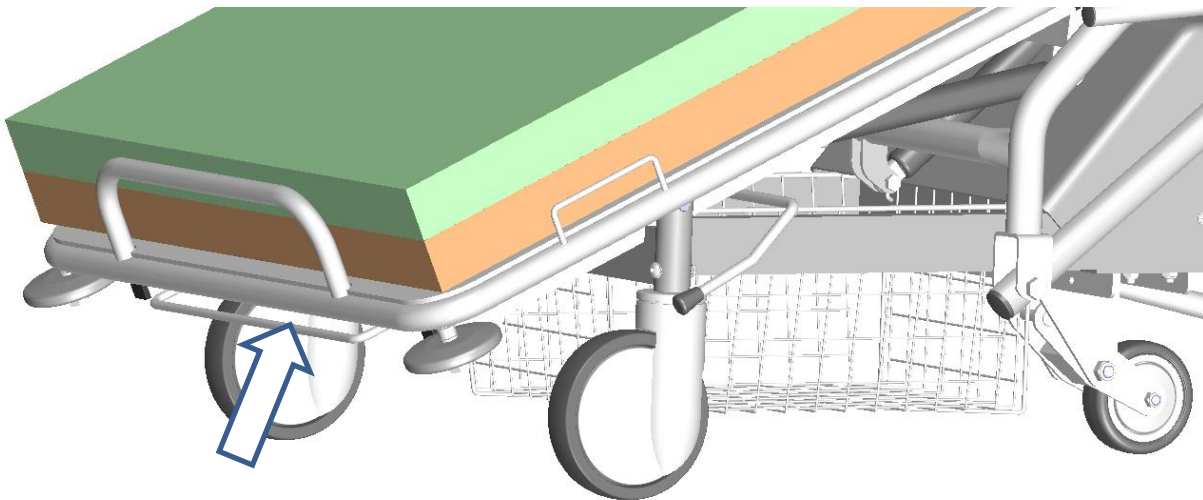

Sänkning av chockläge


Tryck åter på handtagen och pressa liggplanet nedåt.



Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.

2.5 Reglering av bende

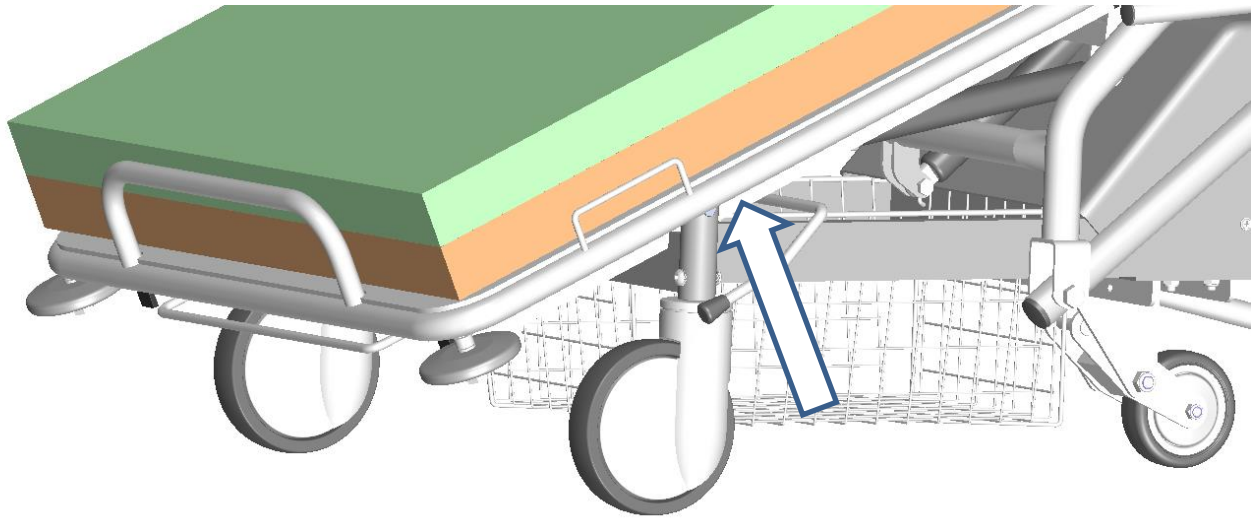

Tryck in handtaget som kan nås från sidorna av patientvagnen. Gaskolven hjälper till att höja bendelen (steglös reglering). Släpp när lämplig vinkel uppnåtts.

För sänkning av bendelen, tryck in handtaget samtidigt som du pressar bendelen nedåt.

Sänkning av chockläge

Tryck åter på handtagen och pressa liggplanet nedåt.




Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.


2.6 Hjulens funktion

Patientvagnen är utrustad med centrallåsta hjul inklusive så kallad riktningspär, en funktion som gör att man enkelt kan styra produkten rakt i exempelvis långa korridorer. Kan även erhållas med ett femte hjul som alternativ (tillval). Det femte hjulet hjälper till att manövrera patientvagnen med precision, även på trängre ytor.


Bromsade hjul

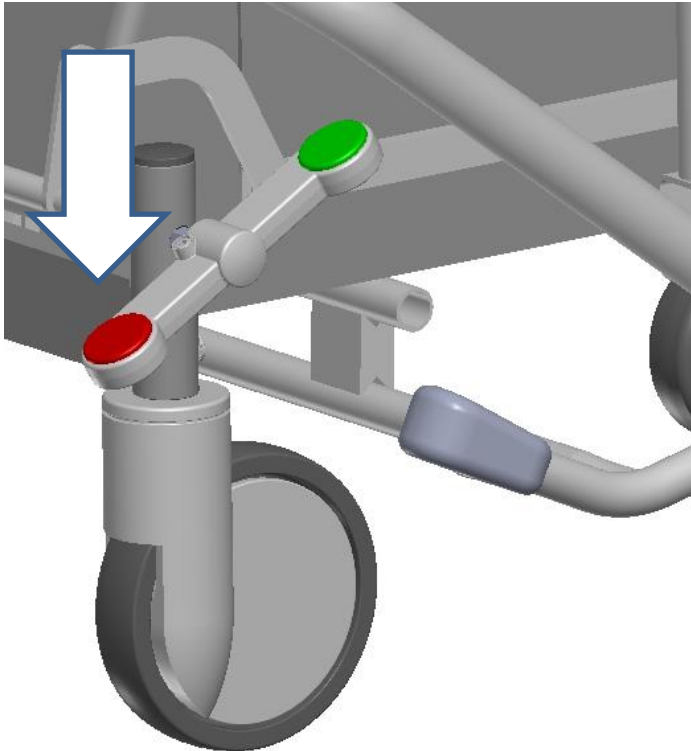



Riktningspärade hjul/aktivering femte hjul

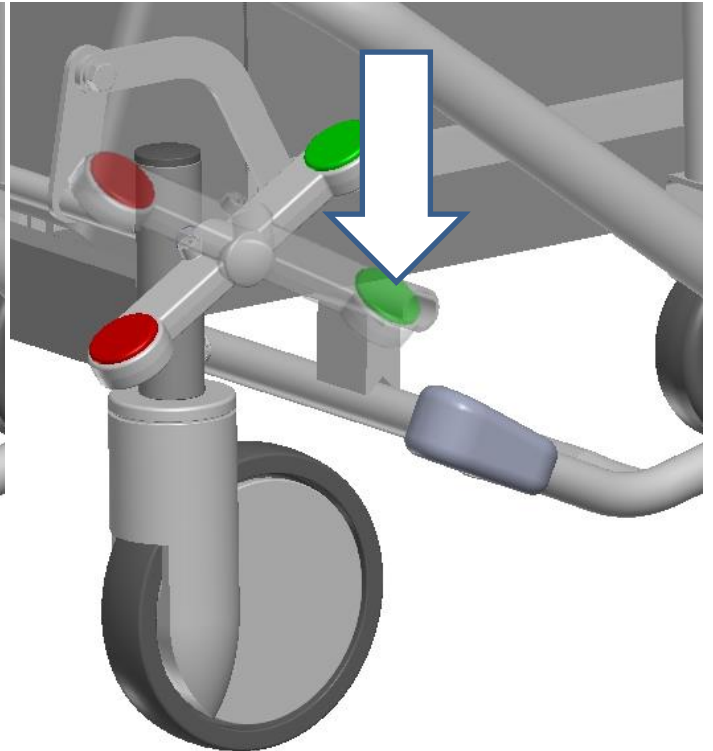

Det femte hjulet

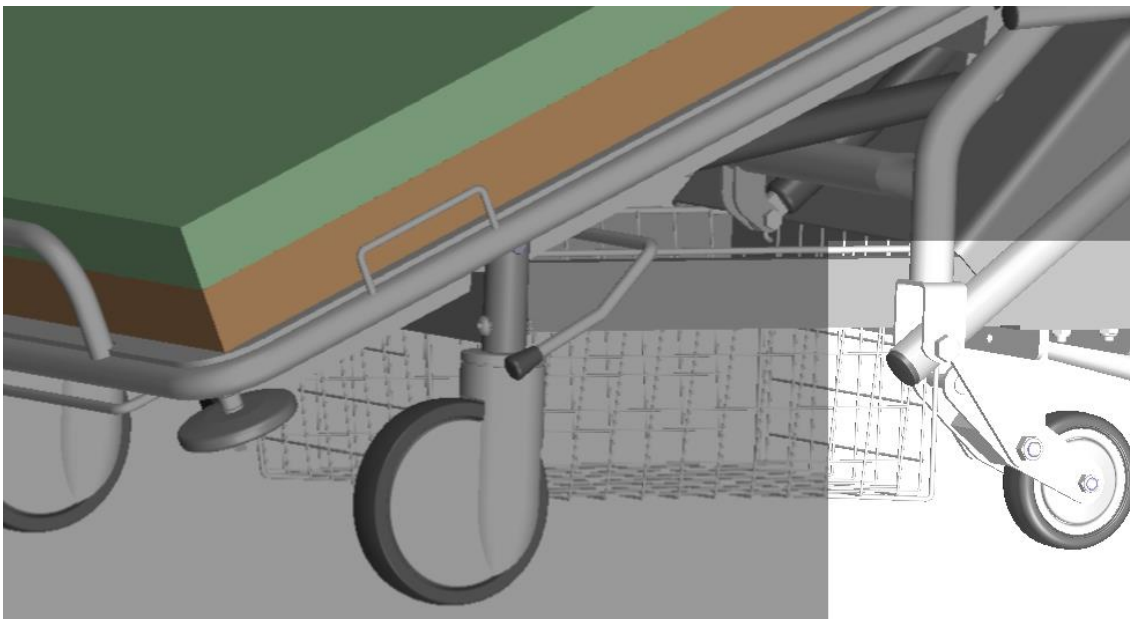

2.7 Sidogrindar

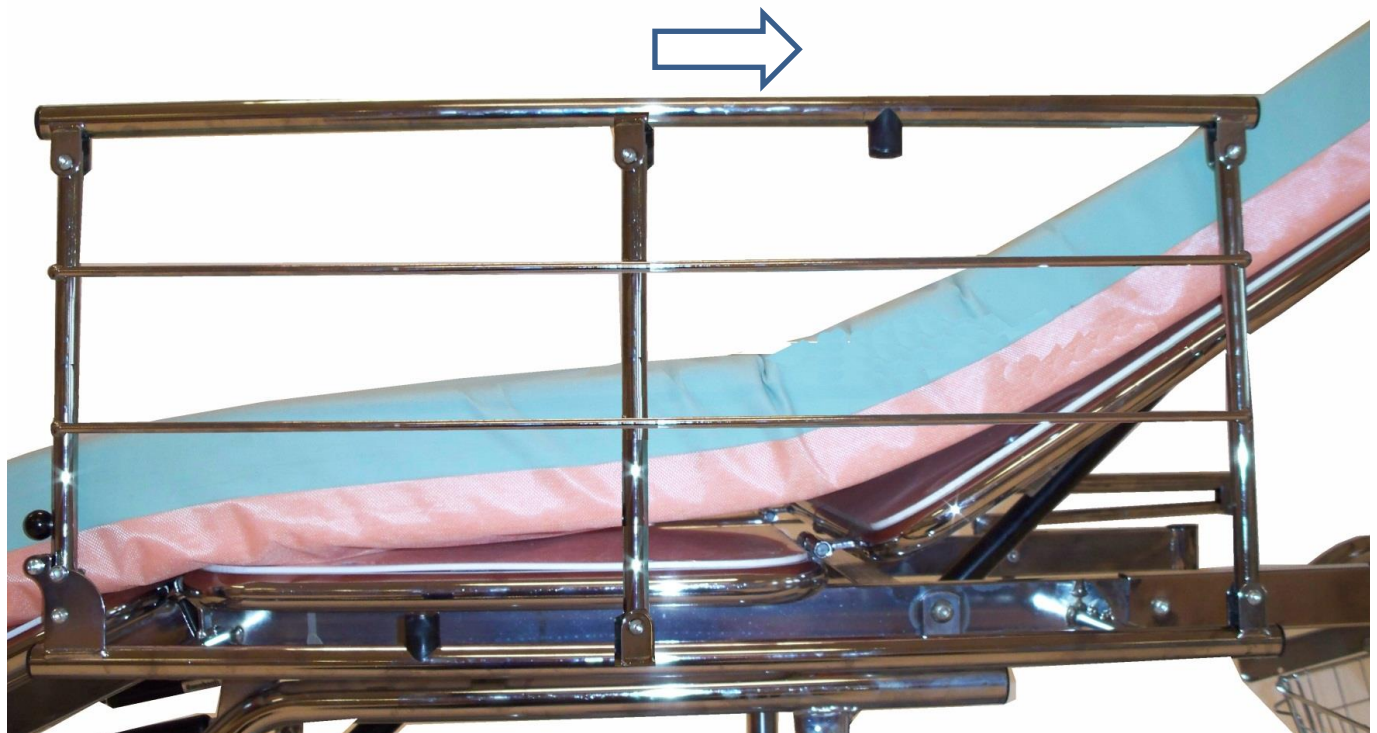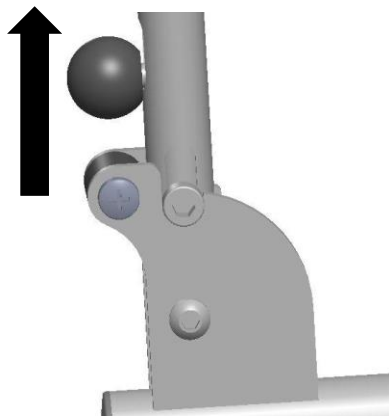

1. Lyft kulan.
2. Fäll sidogrinden med andra handen i pilens riktning.

Klart!



När man ska fälla upp grinden igen drar man bara upp den i motsatt riktning, tills mekaniken/kulan kommer i sitt ursprungsläge.



Varning!

Klämrisk föreligger. Var uppmärksam när du fäller ner sidogrindarna.

2.8 Infusionsstativ

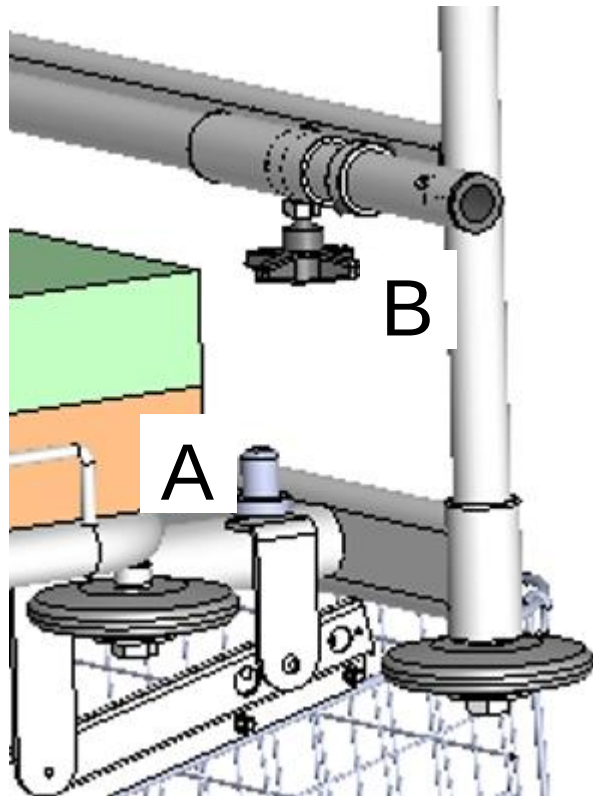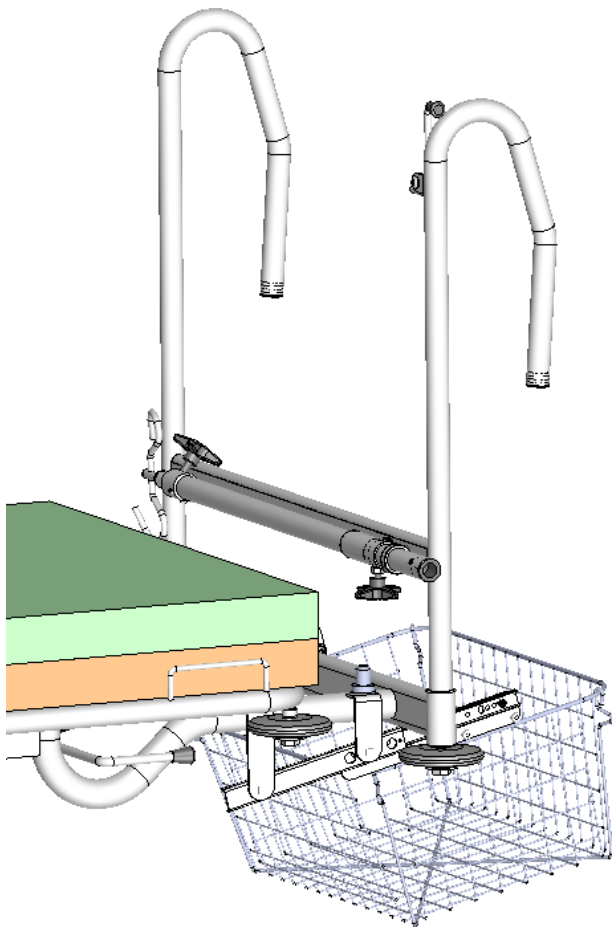


När infusionsstället ej används, placeras det som ovan.

Vrid upp infusionsstället lodrätt. Tryck ner på tappen (A) och dra åt den nedersta ratten (B). Infusionsstativet kan nu regleras upp och ner.

Lås/öppna vreden när du ska reglera höjden på infusionsstativet.

Vid fällning av infusionsstället, sänk till botten, lossa nedersta låsratten (B), lyft från tappen och vrid till vågrätt läge enligt bild ovan.

Se till att alla rattar är låsta innan transport av patientvagnen.

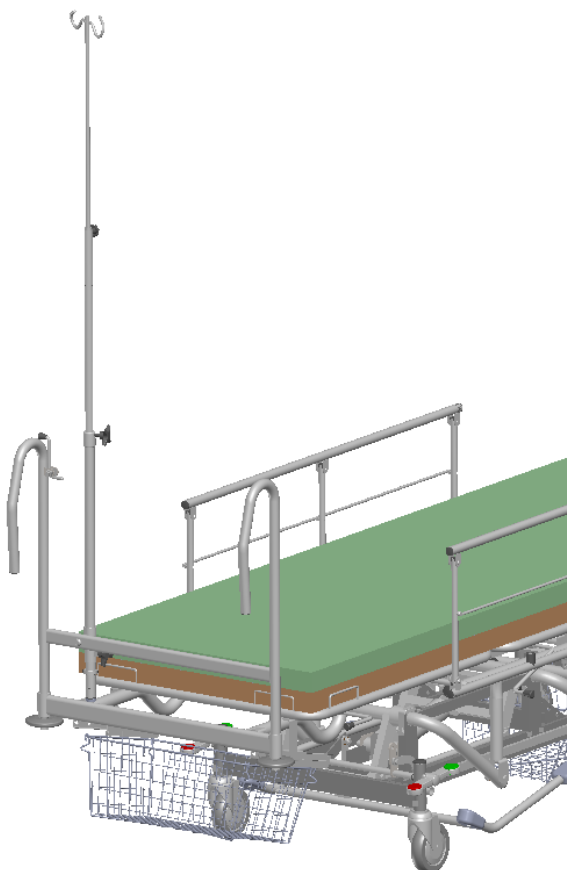

2.9 Förvaringskorg



Förvaringskorgen kan dras ut vid behov.

3. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

3.1 Rutinkontroller

Rutinkontroller och smörjning enligt schema nedan bör göras var 6:e månad eller vid behov för att säkerställa fullgod funktion.

Underlåtelse av följande rutinkontroll kan medföra att patienten och/eller operatören utsätts för onödiga risker samt att produkten kan få minskad livslängd. Kontrollera därför alla funktioner och delar på regelbunden basis.

Kontrollera följande:

- Eventuella missljud.
- Gaskolvarnas funktion.
- Hydraulpumpens funktion
- Hjulens och hjullåsmekanismens funktion.
- Att leder och infästningar smörjs enligt smörjschema.

3.2 Rengöring


Rengöring av dyna

Vid blod, avföring på väven bör den rengöras snarast möjligt med kallt vatten och såpa, tvållösning. Därefter desinficeras den med alkohol med tensider – tensider ger en djuprengörande effekt på ytskiktet. Alkohol utan tensider avdunstar fort och hinner inte verka.

Klor

Klorbaserade rengöringsmedel rekommenderas generellt inte. Klor påverkar såväl produkter som miljö negativt, även om såväl spädningens koncentration som hur man efterbehandlar produkten inverkar. Om klorbaserat medel trots allt används rekommenderas att produkten eftertorkas med lätt vattenfuktad trasa. Överdrag i PU är inte kompatibelt med klor. PVC klarar det acceptabelt.

3.3 Smörjschema

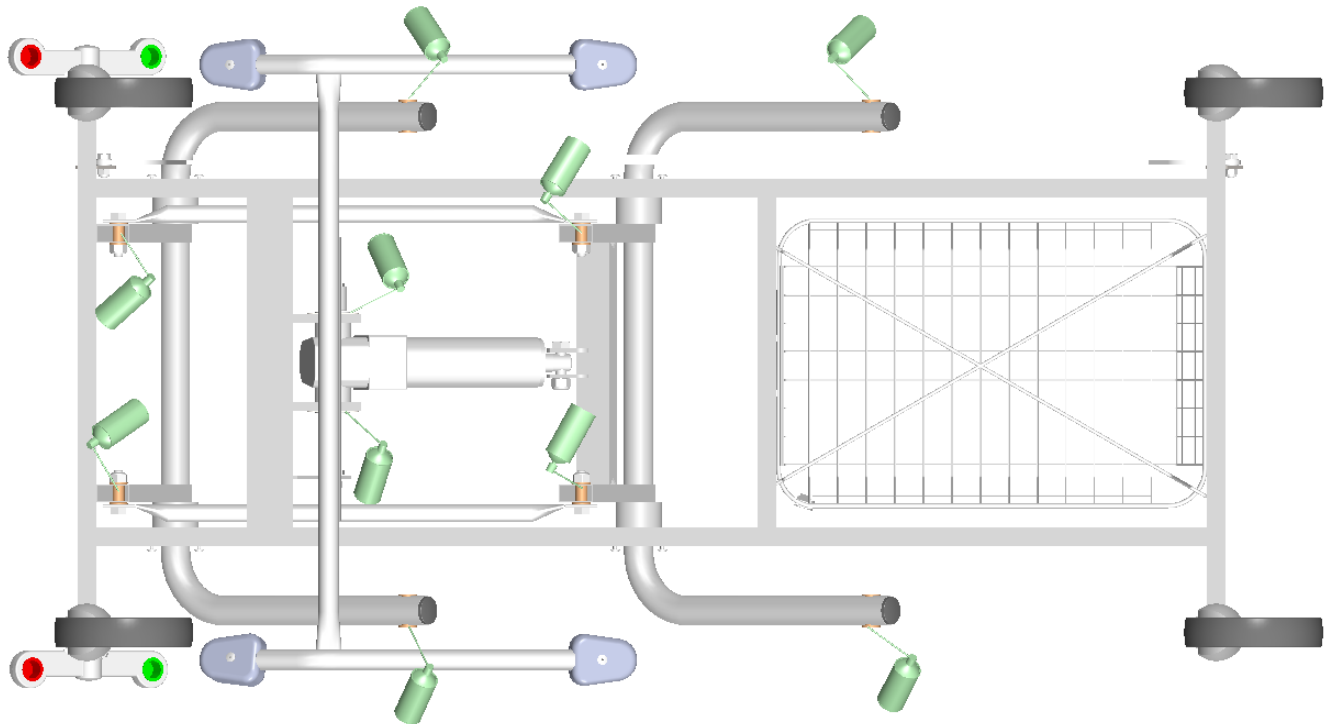

1. Lås först hjulen.
2. Ta någon till hjälp och tippa patientvagnen på sidan, för att kunna smörja de rörliga lederna.

Sprayburken på bilderna ovan indikerar var man ska smörja. Använd helst **"Smörjolja för Sjöbloms/Tarsus medicinska möbler"** eller likvärdig för bästa resultat, art nr 5557001.

3.4 Reservdelslista patientvagn




Nr	Art nr	Benämning
1	G0002	Gaskolv för ryggstöd/bendel
2	G0003	Gaskolv för chockläge
3	00027848	Hjul
4	00032427	Hjul riktningspärtrat
5	HY001	Hydraul för höjning/sänkning
6	10032100000RP	Femte hjulet




3



4

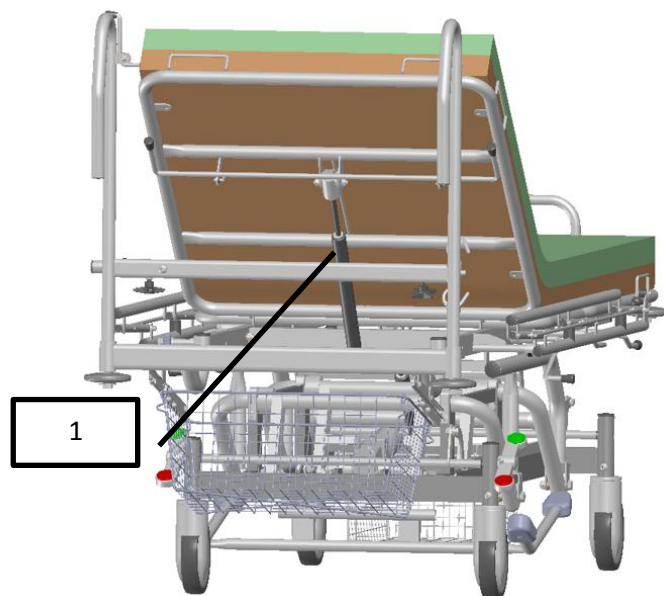

1

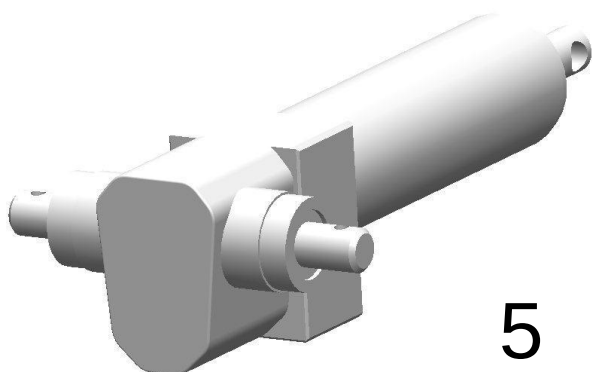

5



6

3.5 Tillbehör

Infusionsstativ, sidogrindar, femte styrhjul

3.6 Smörj-, rengörings- och desinfektionsmedel

R-1, Rengöringsmedel för konstläder

5557001, Olja för smörjning av medicinska möbler

C068, Desinfektionsmedel DAX Plus



Smörjolja



Rengöringsmedel



Desinfektionsmedel

4. TEKNISK SPECIFIKATION

4.1 Måttuppgifter

Längd totalt: 225 cm

Längd liggyta: 200 cm

Bredd liggyta: 70 cm

Bredd inkl avvisarhjulen: 76 cm

Bredd inkl sidogrindar: ca 80 cm

Höjd: 52-90 cm utan dyna

Ryggstöd, längd: 75 cm

Ryggstöd, vinkel: -14°, +4°


Chockläge, vinkel: -14°

Vikt: ca 70 kg

Max patientvikt: 200 kg

SWL: 220 kg

4.5 Etiketter på produkten

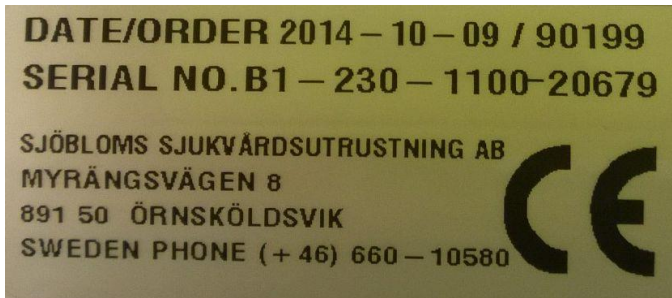


CE-etiketten innehåller datum, ordernummer, serienummer och våra kontaktuppgifter.



Max patientvikt 200 kg.



Visar reglering av ryggstödet.
Det sitter en etikett på varje sida av britsen.

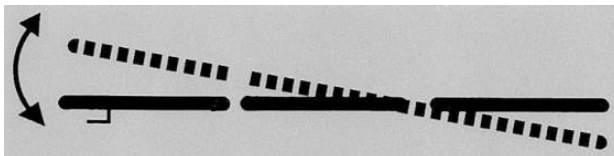

Visar reglering av chockläget.
Det sitter en etikett på varje sida av britsen.



Visar reglering av bendelen.
Det sitter en etikett på varje sida av britsen.

5. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Typ av utrustning: Patientvagn 3-delad, hydraulisk

Art nr: B1-130-1100 Produktreg.nr: 74550

Tillverkare

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB

Myrängsvägen 8

S-891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller tillämpliga krav i såväl EU-direktiv MDD 93/42/EEC och lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter.


Örnsköldsvik 2015-08-27



Karl-Gunnar Sjöblom

Produktionschef

6. KONTAKTUPPGIFTER

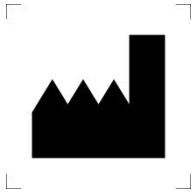

Sjöbloms sjukvårdsutrustning AB
Myrängsvägen 8
891 50 Örnsköldsvik
Sweden

Tel: 0660 105 80

Fax: 0660 180 00

E-mail: info@sjobloms.com

Hemsida: www.sjobloms.com