

ANVÄNDARINSTRUKTION



INFUSIONSSTÄLL VIOLETTA

Gäller följande modeller:

REF

N1-080-3500, N1-080-3500-2



Om du har QR-läsare kan du öppna
Användarinstruktionen digitalt här och
spara den på den enhet du själv föredrar.

OBS!

Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen
noggrant INNAN produkten tas i bruk,
för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord

Garanti

Viktig information

1. Funktionsbeskrivning

1.1 Allmän beskrivning

2. Handhavande

2.1 Uppställning

2.2 Monteringsanvisning handtag

2.3 Monteringsanvisning extra krokar

2.4 Höjdjustering

2.5 Att gå omkring med infusionsstället

3. Underhåll och rengöring

3.1 Rutinkontroller

3.2 Rengöring

3.3 Smörj-, rengörings- och desinfektionsmedel

4. Teknisk specifikation

4.1 Måttuppgifter

4.2 Etiketter på produkten

5. Försäkran om överensstämmelse

6. Kontaktuppgifter

FÖRORD

Välkommen som ägare av ett Infusionsställ tillverkat av Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB. Vi hoppas att Ni skall bli nöjd och tillfredsställd med vår kvalitetsprodukt.

Om ett problem skulle uppstå med någon av våra produkter är Ni alltid välkomna att kontakta oss, så kommer vår serviceavdelning att assistera Er med den expertis som behövs för att lösa problemet.

Användarinstruktionen som Ni håller i Er hand innehåller all information som behövs för att använda, underhålla och utföra service på produkten. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i takt med att produkterna modifieras. Vi reserverar oss därför mot eventuella ändringar i användarinstruktionen.

GARANTI


Sjöbloms utfärdar 2 års garanti för material-, konstruktions- och fabrikationsfel, förutsatt att produkterna inte utsatts för yttre åverkan eller onormalt slitage. För att garantin ska gälla måste produkten ha använts i enlighet med användarinstruktionen, samt att service utförts enligt specifikationen.

VIKTIG INFORMATION

Denna produkt är avsedd för professionellt medicinskt bruk. Användarinstruktionen måste läsas igenom noggrant innan produkten tas i bruk, för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

Användarinstruktionen innehåller varningar där risk föreligger för personskada, som måste uppmärksammas. Felaktigt handhavande kan medföra livsfara.

En varningstriangel visas där särskilt viktig information återfinns.

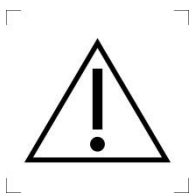

Varningstriangel

1. FUNKTIONSBESKRIVNING

Detta infusionsställ är avsett för professionellt bruk inom vården.

Det är designat för att vara ett funktionellt och användarvänligt arbetsredskap för operatören och patienten.

Notera att produkten endast får användas av kompetent vårdpersonal som läst igenom användarinstruktionen, för ett rätt handhavande.

Allmän beskrivning

Infusionsställ av aluminium. Fembensfot, med 75 mm hjul.

Infusionsstället är utrustat med två krokar och fembensfot, finns både med och utan körhandtag samt med extra paret krokar som tillval. Körhandtaget är löstagbart. Rattlåsningens expanderkonstruktion ger en mjuk och effektiv låsning.

2. HANDHAVANDE

2.1 Uppställning

Infusionsstället levereras monterat med undantag av handtaget och de extra krokarna (båda är tillval). För att ställa upp infusionsstället, gör enligt följande:



Håll infusionsställets rör med ena handen och greppa längst ner mot foten med den andra handen.

Tryck nedåt, ifrån kroppen, för att öppna foten.

Vid stängning, gör i motsatt ordning.



OBS!

Var uppmärksam vid uppställning av foten, då klämrisk föreligger vid felaktigt utförande, samt risk för att ett av benen slår in i kroppen.

2.2 Monteringsanvisning handtag

Handtaget monteras enligt följande:


Öppna ratten och placera handtagets låsning enligt bild.



Placera ratten enligt bild.
Skruva åt.



2.3 Monteringsanvisning extra krokar

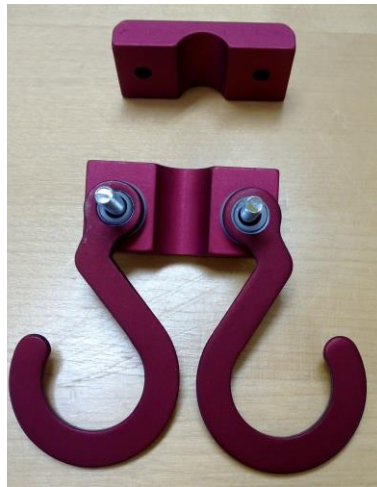

Ta av muttrarna och lyft av fästets ena halva enligt bild.



Montera fästet enligt bild.
Höjdplaceringen på röret är valfritt.

2.4 Höjdjustering



Infusionsstället höjs och sänks manuellt genom att låta på respektive låsratt och höja/sänka efter behov.

2.5 Att gå med infusionsstället

Om infusionsstället används i hemmamiljö och patienten är uppe och går under tiden man får dropp, var uppmärksam så att man inte stöter i trösklar och infusionsstället tippas.



3. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

3.1 Rutinkontroller

Rutinkontroller och smörjning bör göras var 6:e månad eller vid behov för att säkerställa fullgod funktion.



Viktigt!

Underlåtelse av följande rutinkontroll kan medföra att patienten och/eller operatören utsätts för onödiga risker samt att britsen kan få minskad livslängd. Kontrollera därför alla funktioner och delar på regelbunden basis.

Kontrollera följande:

- Eventuella missljud från hjul.
- Kontrollera att hjulen snurrar fritt och problemfritt.
- Lås rattens kondition så att röret sitter ordentligt
- Bultarnas fastsättning så att inga glapp kan förekomma.

3.2 Rengöring

Produkten kan rengöras och desinficeras utan särskilda restriktioner.

3.3 Smörj-, rengörings- och desinfektionsmedel

R-1, Rengöringsmedel för konstläder

5557001, Olja för smörjning av medicinska möbler

C068, Desinfektionsmedel DAX Plus



Smörjolja



Rengöringsmedel



Desinfektionsmedel

4. TEKNISK SPECIFIKATION

4.1 Måttuppgifter

Mått 3-delat

Minimihöjd 85 cm.

Maximihöjd 215 cm.

Mått 2-delat

Minimihöjd 117 cm.

Maximihöjd 215 cm.

Vikt

3-delat ställ: 3,45 kg.

2-delat ställ: 3,35 kg.

Handtag: 245 g.

Max belastning

VIOLETTA 3-delat

Maxbelastning 5 kg droppåsar + 5 kg pump. Eftersom pumpen bara får monteras på den grövre delen av mellanröret (där handtaget annars monteras), kan idag i praktiken bara en pump sättas på ett 3-delat ställ.


VIOLETTA 2-delat

Maxbelastning 5 kg droppåsar + 5 kg pump. Vid montering av pump krävs att man köper till en extra aluminiumdetalj (art nr FAP3000153S) som skyddar röret mot klämskador.

Hjul

75 mm.

4.2 Etiketter på produkten

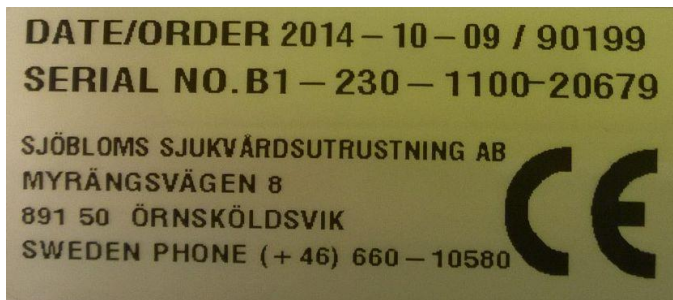

CE-etiketten innehåller datum, ordernummer, serienummer och våra kontaktuppgifter.

Maxbelastning

**Max 10 kg varav
5 kg droppåsar**

5. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Typ av utrustning: Infusionsställ

Art nr: N1-080-3500

Produktregistreringsnummer: 79225

Art nr: N1-080-3500-2

Produktregistreringsnummer: 142905

Tillverkare

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB

Myrängsvägen 8

S-891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller tillämpliga krav i såväl EU-direktiv MDD 93/42/EEC och lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter.


Örnsköldsvik 2016-06-02



Karl-Gunnar Sjöblom

Produktionschef

6. KONTAKTUPPGIFTER

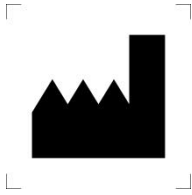

Sjöbloms sjukvårdsutrustning AB
Myrängsvägen 8
891 50 Örnsköldsvik
Sweden

Tel: 0660 105 80

Fax: 0660 180 00

E-mail: info@sjobloms.com

Hemsida: www.sjobloms.com