

ANVÄNDARINSTRUKTION



BÅRTRANSPORTUNDERREDEN

Gäller följande modeller:
030-2000, 030-2020, 030-2030



Om du har QR-läsare kan du öppna
Användarinstruktionen digitalt här och
spara den på den enhet du själv föredrar.

OBS!

Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen
noggrant INNAN produkten tas i bruk,
för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord

Garanti

Viktig information

A: Bårtransportunderrede, höj- och sänkbart

1. Funktionsbeskrivning

1.1 Allmän beskrivning

2. Handhavande

2.1 Höjning/sänkning

2.2 Hjulens funktion

2.3 Reglering av överdel

3. Underhåll och rengöring

3.1 Rutinkontroller

3.2 Rengöring

3.3 Smörjschema

3.4 Smörj-, rengörings- och desinfektionsmedel

4. Teknisk specifikation

4.1 Måttuppgifter

4.2 Etiketter på produkten

5. Försäkran om överensstämmelse

B: Bårtransportunderrede med fast höjd

Underhåll & rengöring

6. Kontaktuppgifter

FÖRORD

Välkommen som ägare av ett Bårtransportunderrede tillverkat av Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB. Vi hoppas att Ni skall bli nöjd och tillfredsställd med vår kvalitetsprodukt.

Om ett problem skulle uppstå med någon av våra produkter är Ni alltid välkomna att kontakta oss, så kommer vår serviceavdelning att assistera Er med den expertis som behövs för att lösa problemet.

Användarinstruktionen som Ni håller i Er hand innehåller all information som behövs för att använda, underhålla och utföra service på produkten. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i takt med att produkterna modifieras. Vi reserverar oss därför mot eventuella ändringar i användarinstruktionen.

GARANTI


Sjöbloms utfärdar 2 års garanti för material-, konstruktions- och fabriktionsfel, förutsatt att produkterna inte utsatts för yttre åverkan eller onormalt slitage. För att garantin ska gälla måste produkten ha använts i enlighet med användarinstruktionen, samt att service utförts enligt specifikationen.

VIKTIG INFORMATION

Denna produkt är avsedd för professionellt medicinskt bruk. Användarinstruktionen måste läsas igenom noggrant innan produkten tas i bruk, för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

Användarinstruktionen innehåller varningar där risk föreligger för personskada, som måste uppmärksammas. Felaktigt handhavande kan medföra livsfara.

En varningstriangel visas där särskilt viktig information återfinns.

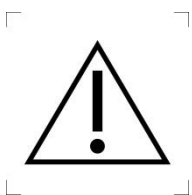

Varningstriangel

1. FUNKTIONSBESKRIVNING

Detta Bårtransportunderrede är avsett för professionellt bruk inom vården, för transport av patient på bår.

Den är designad för att vara ett funktionellt och användarvänligt arbetsredskap för operatören och patienten.

Notera att produkten endast får användas av kompetent vårdpersonal som läst igenom användarinstruktionen, för ett rätt handhavande.

Allmän beskrivning

Bårtransportunderrede med hydraulisk höjdjustering. Förkromat chassi av helsvetsade stålrör.


Lättrullande centrallåsta 150 mm hjul med ett riktningsspärrat hjul.

2. HANDHAVANDE

2.1 Höjning/sänkning


Höjning av Bärtransportunderrede

Pumpa med foten på den långa delen av fotpedalen tills önskad höjd uppnåtts.

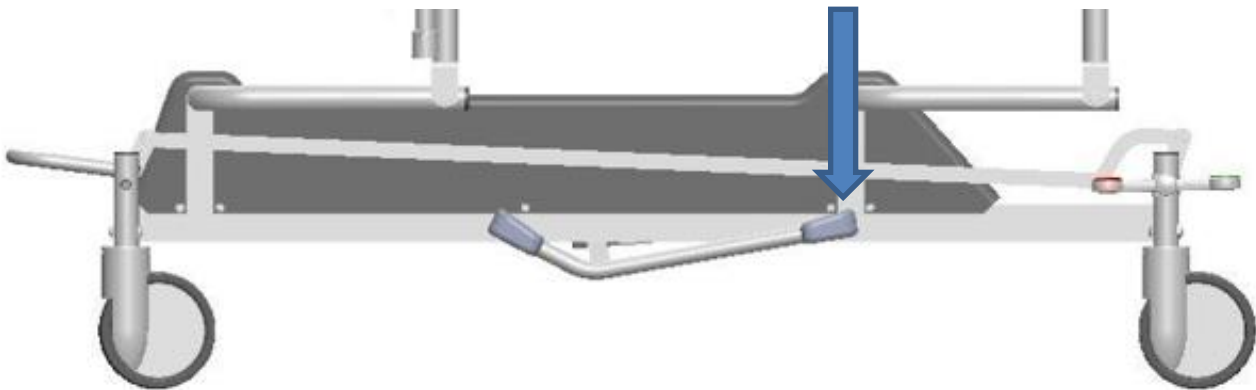

Sänkning av Bärtransportunderrede

Tryck ned foten på den korta delen av fotpedalen. Håll kvar där och britsen sjunker.

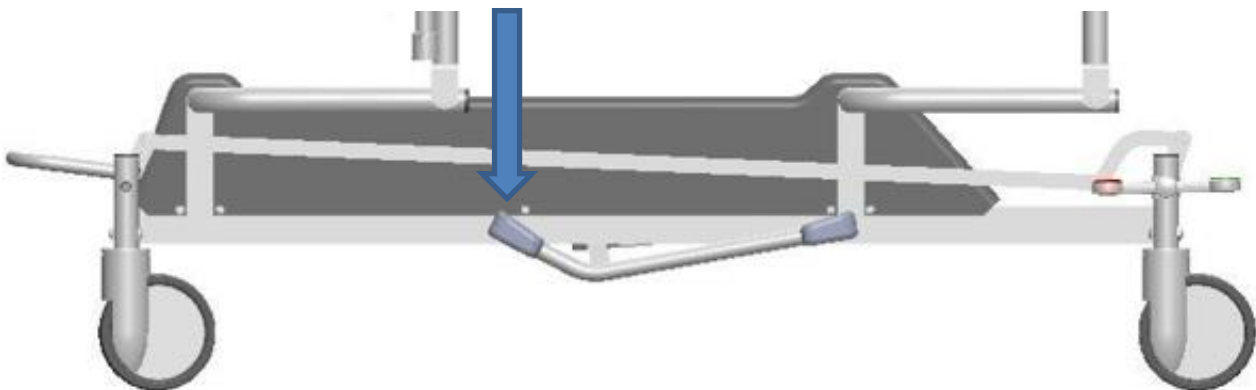


Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.


2.2 Hjulens funktion

Patientvagnen är utrustad med centrallåsta hjul inklusive så kallad riktningspärr, en funktion som gör att man enkelt kan styra produkten rakt i exempelvis långa korridorer.


Fria hjul

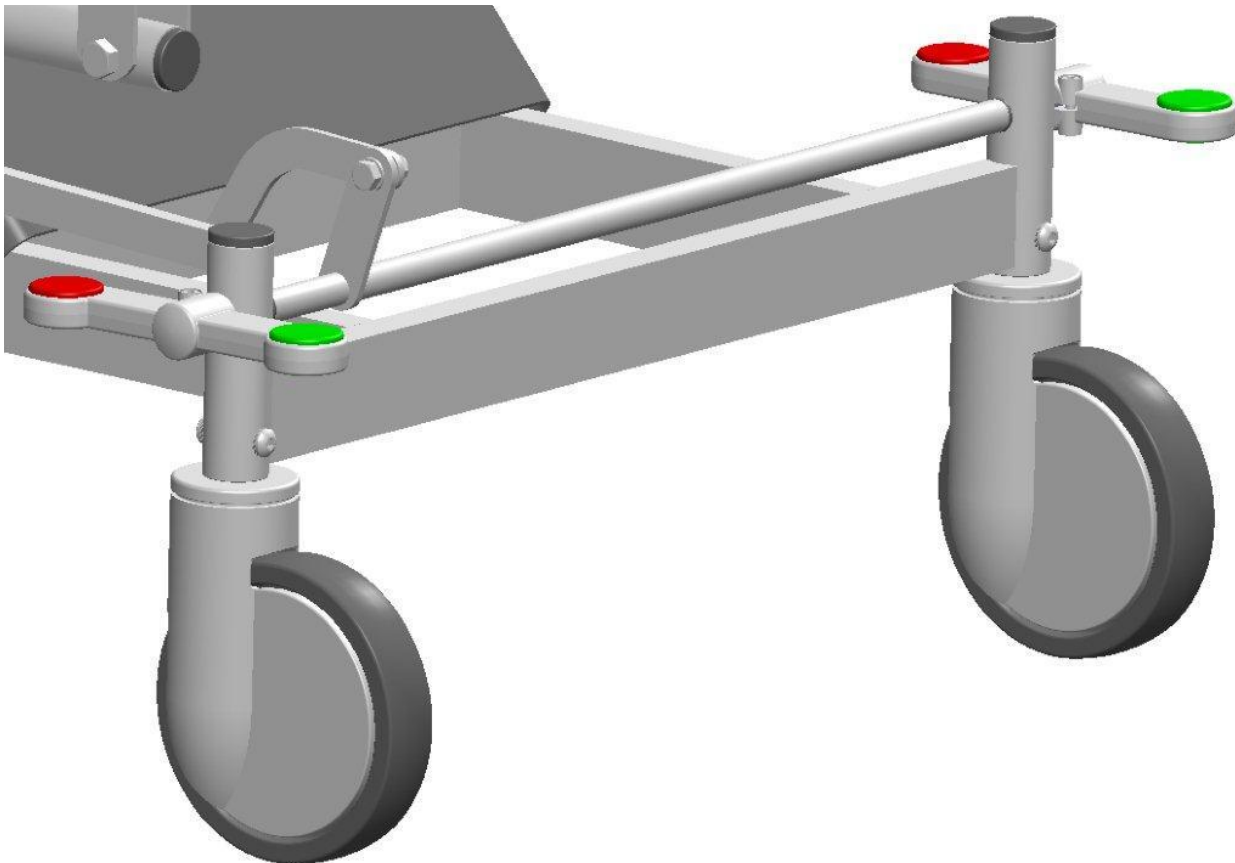

Riktningspärrade hjul

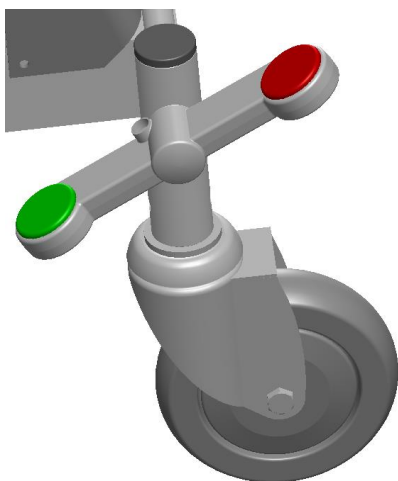

Bromsade hjul

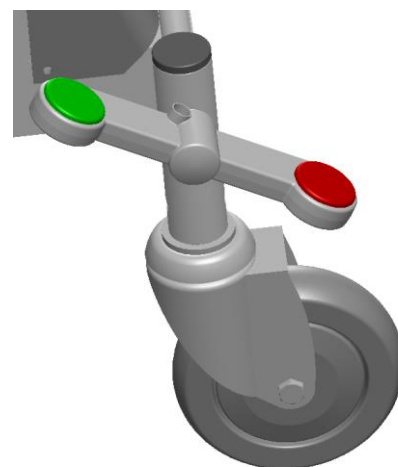

Varning!


Hjulen ska vara låsta innan bären lyfts över på underredet.

2.3 Reglering av överdel



Överdelen är reglerbar i längsled mellan 102 och 127 cm.

Frigör innerröret genom att låta på vreden (1). Glöm inte att dra åt vreden när önskad längd uppnåtts. När överdelen dragits ut till maxlängd, låser det fjädrande stoppet (2) överdelen. Dra ej förbi maxlängden.

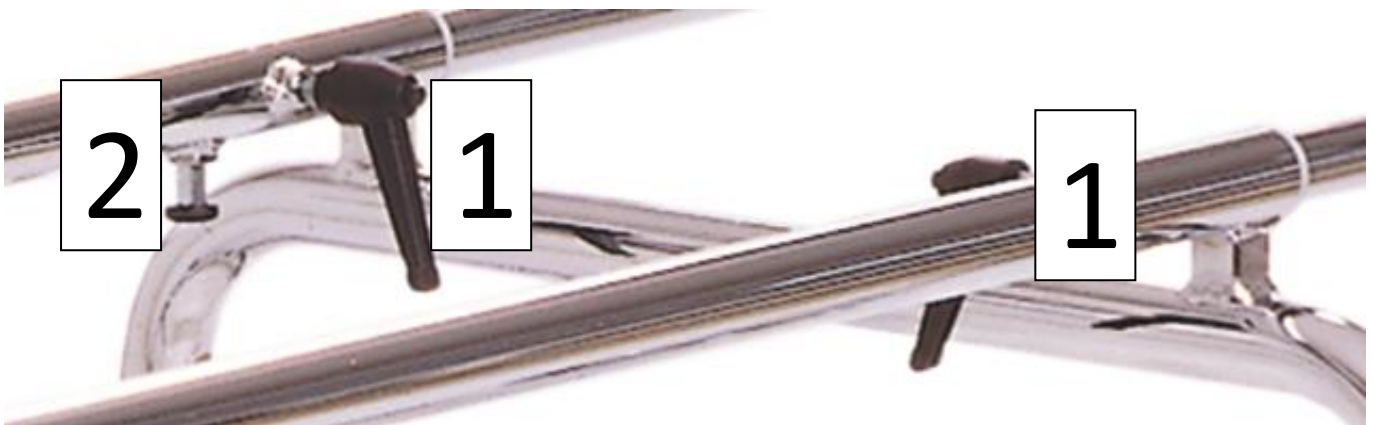

Dra sprinten (2) nedåt och tryck samtidigt in överdelen. Lås vreden (1) när du uppnått önskad längd.



OBS!

Dra ej den reglerbara sektionen av överdelen förbi det stopp som låses av det fjädrande stoppet.

3. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

3.1 Rutinkontroller

Rutinkontroller och smörjning enligt schema nedan bör göras var 6:e månad eller vid behov för att säkerställa fullgod funktion.



Viktigt!

Underlåtelse av följande rutinkontroll kan medföra att patienten och/eller operatören utsätts för onödiga risker samt att produkten kan få minskad livslängd. Kontrollera därför alla funktioner och delar på regelbunden basis.


Kontrollera följande:

- Eventuella missljud.
- Hydraulpumpens funktion
- Hjulens och hjullåsmekanismens funktion.
- Att leder och infästningar smörjs enligt smörjschema.

3.2 Rengöring

Kan desinficeras.

3.3 Smörjschema

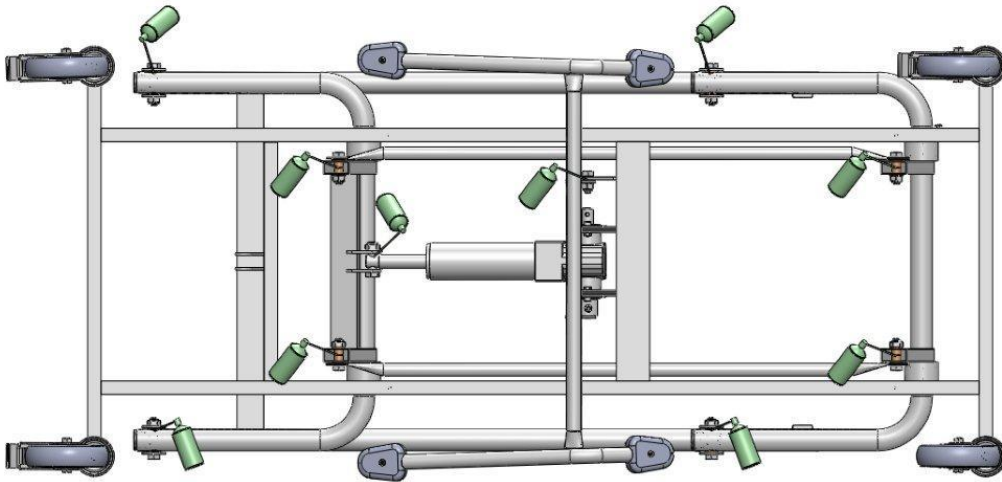

1. Lås först hjulen.
2. Ta någon till hjälp och tippa underredet på sidan, för att kunna smörja de rörliga lederna.

Sprayburken på bilderna ovan indikerar var man ska smörja. Använd helst **"Smörjolja för Sjöbloms/Tarsus medicinska möbler"** eller likvärdig för bästa resultat, art nr 5557001.

3.4 Smörj-, rengörings- och desinfektionsmedel

R-1, Rengöringsmedel för konstläder

5557001, Olja för smörjning av medicinska möbler

C068, Desinfektionsmedel DAX Plus



Smörjolja



Rengöringsmedel



Desinfektionsmedel

4. TEKNISK SPECIFIKATION

4.1 Måttuppgifter

Längd: 150 cm

Bredd: 65 cm


Höjd: 58-94 cm

Vikt: ca 40 kg

Max patientvikt: 200 kg

SWL: 220 kg

4.5 Etiketter på produkten

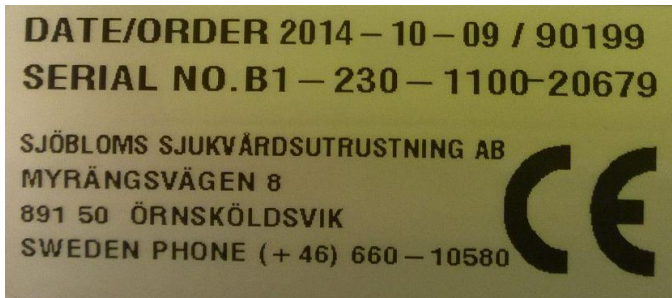

CE-etiketten innehåller datum, ordernummer, serienummer och våra kontaktuppgifter.



Max patientvikt 200 kg.

5. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Typ av utrustning: Bårtransportunderrede, hydrauliskt

Art nr:	030-2000	Produktreg.nr: 10417
Art nr:	030-2020	Produktreg.nr: 10418
Art nr:	030-2030	Produktreg.nr: 10419

Tillverkare

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB

Myrängsvägen 8

S-891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller tillämpliga krav i lag (1993:584) om medicintekniska produkter samt i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter.

Örnsköldsvik 2014-12-03



Karl-Gunnar Sjöblom

Produktionschef

B. Bårtransportunderrede med fast höjd



Tål rengöring och desinfektion enligt landstingens standard.

Torka med mjuk trasa för att undvika repor.

Det enda förebyggande underhåll och/eller service som rekommenderas gäller hjulen, som vid behov kan smörjas med "Smörjolja för Sjöbloms/Tarsus medicinska möbler" eller likvärdig, vårt artikelnummer 5557001.

Måttuppgifter 030-2000, 030-2020

Längd: 130 cm

Bredd: 69 cm

Höjd modell 030-2000: 77 cm (71 cm för modell 030-2020)

Vikt: ca 40 kg

Max belastning: 200 kg

5. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Typ av utrustning: Bårtransportunderrede
Art nr: 030-2000 Produktregistreringsnummer: 10417
Art nr: 030-2020 Produktregistreringsnummer: 10418
Art nr: 030-2030 Produktregistreringsnummer: 10419

Tillverkare
Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB
Myrängsvägen 8

S-891 50 ÖRNSKÖLDSVIK


Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller tillämpliga krav i såväl EU-direktiv MDD 93/42/EEC och lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter.

Örnsköldsvik 2015-08-27



Karl-Gunnar Sjöblom
Produktionschef

6. KONTAKTUPPGIFTER

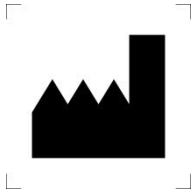

Sjöbloms sjukvårdsutrustning AB
Myrängsvägen 8
891 50 Örnsköldsvik
Sweden

Tel: 0660 105 80

Fax: 0660 180 00

E-mail: info@sjobloms.com

Hemsida: www.sjobloms.com