

Användarinstruktion Operationsstol



Sjöbloms sjukvårdsutrustning AB
Myrängsvägen 8
891 50 Örnsköldsvik
Sweden

Operationsstolen finns i olika utföranden, med eller utan hjul, med hand- eller fotkontroll av höjden.

Handkontroll

Höjden regleras med hjälp av handtaget som finns under sätet. Dra handtaget uppåt och reglera höjden med hjälp av din sittyngd.

Fotkontroll

Höjden regleras med hjälp av fotreglaget som finns under fotkrysset. Tryck på fotringen och släpp när önskad höjd uppnåtts.

Rengöring/skötsel av metallen

Stolen tål rengöring och desinfektion enligt landstingens standard.

Torka med mjuk trasa för att undvika repor.

Det enda förebyggande underhåll och/eller service som rekommenderas gäller hjulen, som vid behov kan smörjas med "Smörjolja för Sjöbloms/Tarsus medicinska möbler" eller likvärdig, vårt artikelnummer 5557001

Rengöring/skötsel av dyna

Vid normal rengöring bör ljummet vatten och mild tvållösning användas. Starkare rengöringsmedel bör så långt som möjligt undvikas.

Om man trots allt måste använda starkare medel är det viktigt att man torkar med fuktig trasa.

Desinfektion

Om produkten behöver desinfekteras, ska svag spritlösning användas. Alltför stark spritlösning kan ha uttorkande effekt, vilket gör att konstlädrets egenskaper försämras och sprickbildningar kan uppkomma.



Tel 0660-105 80
Mail info@sjobloms.com

Fax 0660-180 00
www.sjobloms.com