

VIKTIG INFORMATION OM RENGÖRING AV DERUNGS OPTICLUX



Armaturen är endast avsedd för **alkoholfria rengöringsmedel** som har godkänts för användning på plastmaterial av PC, PMMA, PA och ABS med en mjuk repfri rengöringsduk.

Rengöring med icke godkända metoder som leder till påverkan utav armaturens material och/eller förstöringslins **TÄCKS EJ AV GARANTI.**

Se armaturens bruksanvisning för detaljer.

Observera; Skador kan uppstå på grund av felaktig rengöring:

- För desinfektion får endast sådana medel användas som inte påverkar armaturens funktionalitet.
- För desinfektionsrengöring får inga lösningsmedel, klor- eller slipmedelshaltiga rengöringsmedel användas, eftersom sådana medel bland annat kan orsaka sprickbildning i plastdelar.
- De medel som används ska vara godkända för användning på plast som t.ex. PC, PMMA, PA och ABS.
- Skada på armaturen på grund av koncentrerat desinfektionsmedel.
- Repor kan orsakas av felaktiga rengöringsdukar.

Rekommenderade desinfektionsmedel:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ► Bacillol 30 Foam | ► Terralin PAA |
| ► Dismozon Plus | ► Terralin Protect |
| ► Kohrsolin Extra | ► Virex Tb |
| ► Lysoformin | ► CaviCide 1 |
| ► Mediclean | ► Gemicidal Bleach |
| ► Meliseptol Foam Pure | ► Hexaquart XL |
| ► Microbac Tissues | |
| ► Mikrozyd Sensitive Liquid | |

5.3 Transportläge



- Transportera armaturen endast i detta läge.

6. RENGÖRING OCH DESINFEKTION

FARA

Livsfara på grund av elektrisk chock

- Före desinfektion och rengöring ska strömmen stängas av och säkras mot obehörig tillkoppling.

OBSERVERA

Sakskador på grund av felaktig rengöring

- För desinfektion får endast sådana medel användas som inte påverkar armaturens funktionalitet.
- För desinfektionsrengöring får inga lösningsmedel, klor- eller slipmedelshaltiga rengöringsmedel användas, eftersom sådana medel bland annat kan orsaka sprickbildning i plastdelar.
- De medel som används ska vara godkända för användning på plast som t.ex. PC, PMMA, PA och ABS.
- Skada på armaturen på grund av koncentrerat desinfektionsmedel.
- Följ informationen i tillägget till använt medel när det gäller koncentration och exponeringstid.
- Repor orsakade av felaktiga dukar

REKOMMENDERADE DESINFEKTIONSMEDEL

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ► Bacillol 30 Foam | ► Terralin PAA |
| ► Dismozon Plus | ► Terralin Protect |
| ► Kohrsolin Extra | ► Virex Tb |
| ► Lysoformin | ► CaviCide 1 |
| ► Mediclean | ► Gemicidal Bleach |
| ► Meliseptol Foam Pure | ► Hexaquart XL |
| ► Microbac Tissues | |
| ► Mikrozyd Sensitive Liquid | |

OBSERVERA

Smuts reducerar lyskraften

- Håll bländaren ren genom regelbunden rengöring.
- Endast torkrengöring är tillåten.



- Rengör PMMA-skärmen med en icke-slipande rengöringsduk och ett lämpligt rengöringsmedel.

OBSERVERA

För att minimera risken för överföring av sjukdomar, ska utöver dessa instruktioner, gällande arbetsskyddsbestämmelser och krav från behöriga nationella myndigheter för hygien och desinfektion följas.

7 SÄKERHETSTEKNISKA KONTROLLER

FARA

Livsfara på grund av elektrisk chock

- Dra ut stickkontakten ur eluttaget
- Kontrollera minst en gång per år att inte anslutningskabeln är skadad.

OBSERVERA

- Underhåll och reparationer får endast utföras av behörig elektriker.
- Motsvarande användarprofil finns i kapitel 2 Säkerhetsanvisningar.

ÅRLIGEN:

- Granska strömförsörjningskabeln med avseende på skador och ersätt vid behov.
- Granska plastdelarna med avseende på lackskador och sprickbildning.
- Kontrollera ifall den bärande stommen är skadad eller deformation.
- Kontrollera att inga komponenter sitter löst.